


Pflegebetten

.bock^{///}

- belluno
- livorno / livorno niedrig / livorno hydraulik
- verona / verona niedrig
- combiflex / combiflex.fc
- pratico
- pratico 25/80
- pratico comfort
- pratico economic

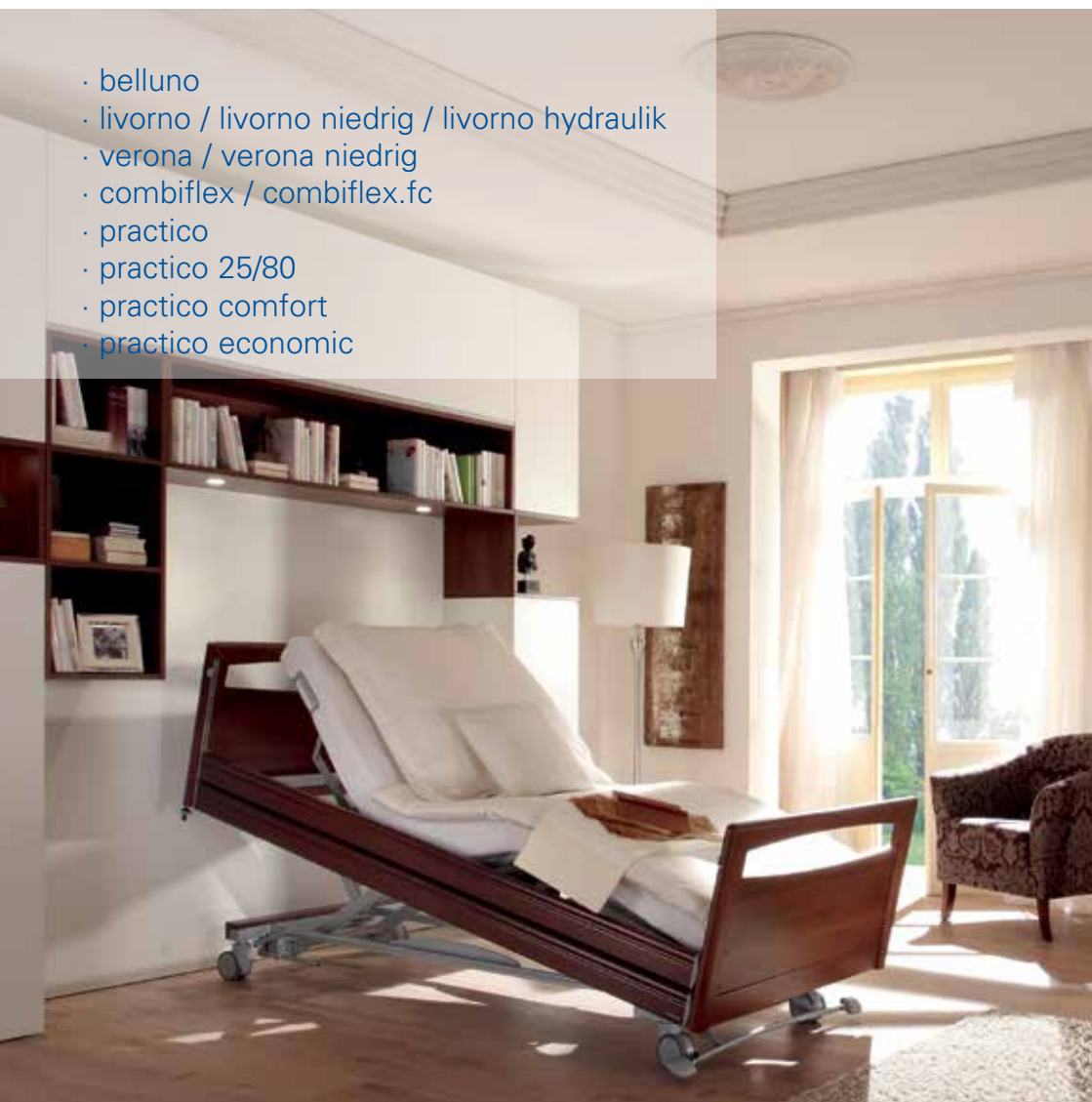

Sehr verehrter Kunde,

mit Ihrer Entscheidung zum Kauf eines Therapie- und Rehabettes aus dem Haus Hermann Bock GmbH erhalten Sie ein langlebiges Pflegeprodukt mit erstklassiger Funktionalität auf höchstem Sicherheitsniveau. Unsere elektrisch betriebenen Pflegebetten garantieren optimalen Liegekomfort und ermöglichen gleichzeitig eine professionelle Pflege. Im Mittelpunkt steht dabei der pflegebedürftige Mensch, dessen Vertrauen es zu stärken und dessen Leben es zu schützen gilt. Die Voraussetzungen dafür haben wir mit diesem Pflegeprodukt geschaffen. Wir bitten Sie, Ihrerseits durch die genaue Einhaltung der Sicherheits- und Gebrauchshinweise sowie durch die erforderliche Wartung möglichen Funktionsstörungen und Unfallgefahren vorzubeugen.

Ihr

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Klaus Bock', with a stylized flourish at the end.

Klaus Bock

Inhalt

4	1. Vorwort und allgemeine Hinweise
	1.1 Zweckbestimmung
	1.2 Definition der Personengruppen
	1.3 Sicherheitshinweise
	1.4 Typenschild
9	2. Allgemeine Funktionsbeschreibung
16	3. Elektrische Bauteile
	3.1 Antrieb
	3.2 Sperreinrichtung für alle Funktionen
	3.3 Antrieb zur Niveaueinstellung
	3.4 Der abschließbare Handschalter
	3.5 Vorsicht: Elektrischer Antrieb
20	4. Die Antriebe
	4.1 Die 24 Volt Antriebe
	4.1.1 Die Antriebssysteme
	4.1.2 Das externe Schaltnetzteil SMPS
	4.2 Die Antriebe mit Netzfreeschaltung
	4.2.1 Doppelantriebssysteme
	4.2.2 Die Netzfreeschaltung
	4.2.3 Das ICS Antriebssystem
26	5. Aufbau und Bedienung
	5.1 Technische Daten
27	5.2 belluno
30	5.3 livorno / livorno niedrig / livorno hydraulik
32	5.4 verona / verona niedrig
34	5.5 combiflex / combiflex.fc
38	5.6 practico / practico 25/80 / practico comfort / practico economic
	5.7 Montage der Seitengitter
	5.8 Steuerung
	5.9 Standortwechsel
	5.10 Transport- Lagerungs- und Betriebsbedingungen
	5.11 Funktionshinweise
	5.12 Entsorgung
	5.13 Störungsabhilfe
50	6. Zubehör
	6.1 Sondermaße
	6.2 Montage – Bettverlängerungen
	6.3 Montage – Zubehör
	6.4 Matratzen
56	7. Reinigung, Pflege und Desinfektion
	7.1 Reinigung und Pflege
	7.2 Desinfektion
	7.3 Gefahren vermeiden
58	8. Regelmäßige Funktionsprüfung mit Service
60	9. Leitlinien und Herstellererklärung
62	10. Konformitätserklärung
64	11. Regelmäßige Funktionsprüfung (Vorlage)
68	12. Vertriebspartner

> Bock-Top-Tipp

Die Angaben, welche und wie viel Bauteile bei Ihrer Sichtkontrolle an Ihrem Gesundheitsbett vorhanden sein müssen, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Montageanleitung Ihres Bettmodells ab Kapitel 5.

* Bock-Gefahren-Hinweis

Um mögliche Beschädigungen und Funktionsstörungen bei der Montage und Inbetriebnahme zu vermeiden, sollte diese Montage- und Gebrauchsanweisung von Ihnen als Anwender vorher vollständig gelesen werden.

1. Vorwort und allgemeine Hinweise

Die unterschiedlichen Bettsysteme von Hermann Bock erfüllen spezielle Anforderungen für den Einsatz in Pflege- und Therapieeinrichtungen sowie für die Pflege zu Hause. Dabei zeichnen zuverlässige Funktionalität und Langlebigkeit jedes einzelne Bett als besonders hochwertig aus. Bei sachgemäßer Bedienung und Wartung bleibt das Bett entsprechend wartungsarm. Jedes Bett von Hermann Bock verlässt die Produktion erst nach einer bestandenen Qualitätsprüfung in der Endkontrolle und ist vom TÜV geprüft. Damit erfüllt jedes Gesundheitsbett die Anforderungen der Richtlinien 93/42/EWG für Medizinprodukte (Klasse I). Die Betten sind entsprechend der aktuell geltenden Normen für medizinisch genutzte Betten hergestellt und geprüft.

Ab April 2013 entsprechen die Betten der Norm EN 60601-2-52:2010. Die elektrischen Bauelemente entsprechen der Sicherheitsnorm EN 60601-1:2006 für medizinische Geräte.

Die neue Norm unterteilt die Betten in fünf verschiedene Anwendungsgebiete:

1. Intensivpflege in einem Krankenhaus, Intensivbett
2. Akutpflege in einem Krankenhaus oder einer anderen medizinischen Einrichtung, Patientenbett im Krankenhaus
3. Langzeitpflege in medizinischer Umgebung, stationäres Pflegebett
4. Pflege zuhause, reines HomeCare-Bett
5. Ambulante Pflege

1.1 Zweckbestimmung

Das Pflegebett ist für die Lagerung von Patienten oder Bewohnern ab 12 Jahren mit einer Körpergröße von mind. 150 cm in Alten- bzw. Pflegeheimen und Reha-Einrichtungen bestimmt. Es dient zum Zweck der Linderung einer Behinderung bzw. zur Erleichterung für Pflegebedürftige und Pflegekräfte. Weiterhin wurde das Pflegebett als komfortable Lösung für die häusliche Pflege für gebrechliche und pflegebedürftige Menschen, sowie

für Menschen mit Behinderung entwickelt. Diese medizinische Versorgung in häuslicher Umgebung wurde nach der Norm EN 60601-1-11:2010 nachgewiesen. Demnach sind die Pflegebetten für die Anwendungsumgebungen 3 bis 5 bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist von möglicher Haftung ausgeschlossen.

Die Trendelenburgfunktion ist eine Sonderausstattung auf Wunsch und gehört nicht zur Serienausstattung. Sie darf ausschließlich durch medizinisches Fachpersonal eingesetzt werden. Betten, die für die Anwendungsumgebung 4 bestimmt sind, werden mit einem Handschalter ausgestattet, der die Trendelenburgfunktion nicht ansteuern kann.

Das Pflegebett ist nicht für den Einsatz in Krankenhäusern geeignet.

Sofern das Pflegebett mit offenen Rollen ausgestattet ist, ist das Pflegebett für den Transport von Patienten geeignet. Das Pflegebett ist während der Lagerung des Patienten fahrbar. Zur Vorbereitung dazu die Rollen feststellen, die Liegefläche in die unterste waagerechte Position verfahren. Die Rollen lösen und das Bett verschieben. Nach dem Transport die Rollen feststellen. Ist das Pflegebett mit einer Rollenverkleidung ausgestattet, ist das Bett lediglich dafür bestimmt, innerhalb des Patientenzimmers zur Reinigung oder für den Zugang zum Patienten bewegt zu werden. Ist das Pflegebett mit Stellfüßen ausgestattet, ist es nicht möglich das Pflegebett zu verschieben.

Achtung: Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen Potenzialausgleich. Medizinische elektrische Geräte, die intravaskular oder interkardial mit dem Patienten verbunden sind, dürfen nicht verwendet werden. Der Betreiber der Medizinprodukte trägt die Verantwortung, dass die Kombination der Geräte die Anforderungen der DIN EN 60601-1:2006 erfüllt.

Diese Bedienungsanleitung enthält Sicherheitshinweise. Alle Personen, die mit den Betten arbeiten, müssen den Inhalt dieser Anleitung kennen. Unsachgemäße Bedienung kann zu Gefährdungen führen.

> Bock-Top-Tipp

Bei unklaren Störungen, bei Ausfall oder Beschädigung des elektrisch betriebenen Bettes oder seiner Zubehörteile sollten als sofortige Notmaßnahme der Netzstecker herausgezogen und die Notabsenkung aktiviert werden. Bitte informieren Sie den Betreiber oder das Service-Team von Hermann Bock.

* Bock-Gefahren-Hinweis

Dem Betreiber obliegt die Entscheidung, besondere Sicherheitsmaßnahmen bei sehr unruhigen Pflegepersonen zu ergreifen, um das Einklemmen einzelner Gliedmaßen oder das vollständige Herausgleiten zu verhindern. Das Service-Team von Bock informiert Sie gern über Sonderlösungen für diese Pflegesituationen.

1.2 Definition der Personengruppen

Betreiber

Betreiber (z.B. Sanitätshäuser, Fachhändler, Einrichtungen und Kostenträger) ist jede natürliche oder juristische Person, die die Betten verwenden oder in deren Auftrag es verwendet wird. Für die Einweisung des Produktes ist immer der Betreiber verantwortlich.

Anwender

Anwender sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung oder Produktschulung berechtigt sind, das Pflegebett zu bedienen oder an ihm Arbeiten zu verrichten. Der Anwender ist in der Lage mögliche Gefahren zu erkennen bzw. zu vermeiden und den gesundheitlichen Zustand des Patienten zu beurteilen.

Patient / Bewohner

Pflegebedürftige, sowie Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen, die im Pflegebett liegen.

Fachpersonal

Als Fachpersonal werden Mitarbeiter des Betreibers bezeichnet, die aufgrund ihrer Ausbildung oder Unterweisung berechtigt sind, das Pflegebett auszuliefern, zu montieren, zu demonstrieren und zu transportieren. Diese Personen sind in die Vorschriften zur Reinigung und Desinfektion des Pflegebettes eingewiesen.

1.3 Sicherheitshinweise

Der bestimmungsgemäße Gebrauch aller beweglichen Bauteile ist zur Vermeidung von Gefahren für die pflegebedürftige Person genauso entscheidend wie für die Sicherheit der Angehörigen und / oder des Pflegepersonals. Voraussetzung dafür sind die richtige Montage und Bedienung des Bettes. Auch die individuelle physische Konstitution der Pflegeperson sowie Art und Umfang der Behinderung müssen unbedingt bei dem Betrieb des Bettes berücksichtigt werden.

Vermeiden Sie Gefährdungen durch unbeabsichtigte motorische Verstellungen und Fehlbedienungen durch den Einsatz der Sperreinrichtung. Wenn der Anwender, z. B. das Pflegepersonal oder betreuende Angehörige, den Raum verlassen, sollten die kompletten Bedienfunktionen des Bettes über den Schlüssel des Handschalters gesperrt werden. Dazu zunächst die Liegefläche in die tiefste Position bringen und mit einer entsprechenden Drehung des Schlüssels in dem rückseitig befindlichen Sperrschloss die Sperrfunktion aktivieren. Den Schlüssel abziehen und zur Sicherheitskontrolle die Funktionen des Handschalters auf tatsächliche Sperrung prüfen.

Diese Empfehlungen gelten insbesondere dann,

- > wenn die Pflegeperson selbst aufgrund bestimmter Behinderungen keine sichere Bedienung der Handschaltung vornehmen kann,
- > wenn die Pflegeperson oder das Pflegepersonal durch ungewollte Verstellungen gefährdet werden können,
- > wenn sich die Seitengitter in hochgestellter Position befinden und es zu Einklemm- und Quetschungsgefahren kommen kann,
- > wenn sich Kinder unbeaufsichtigt mit dem Bett in einem Raum aufhalten.

Achten Sie immer darauf, dass die Handschaltung bei Nichtgebrauch sicher am Bett mit dem Aufhanghaken eingehängt ist und nicht herunterfallen kann.

Die Bedienung des Bettes sollte grundsätzlich nur von eingewiesenem Pflegepersonal bzw. Angehörigen oder im Beisein von eingewiesenen Personen erfolgen.

Beim Verstellen der Liegefläche ist besonders darauf zu achten, dass sich keine Gliedmaßen in den Seitengittern im Verstellbereich befinden. Auch wenn die Seitengitter selbst verstellt werden, ist auf die richtige Liegeposition der Pflegeperson zu achten.

Vor einer elektrischen Verstellung ist grundsätzlich immer zu kontrollieren, ob sich einzelne Gliedmaßen im Verstellbereich zwischen Untergestell und Kopf- bzw. Fußteil oder sogar Personen zwischen Fußboden und hochgefahrener Liegefläche befinden. In diesen Bereichen besteht besonders hohe Quetschgefahr.

Das zulässige Patientengewicht ist abhängig vom gleichzeitig mit angebrachten Gesamtgewicht des Zubehörs (Matratzen oder zusätzliche medizinische elektrische Geräte). Die jeweils max. Arbeitslast entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Rahmen der Liegefläche.

1.4 Typenschild (Beispiel):



- (1) Modellbezeichnung
- (2) Herstellungsdatum: Tag, Monat und Jahr
- (3) Seriennummer: Auftragsnummer – Fortlaufende Nummer
- (4) Netzspannung; Netzfrequenz und Stromaufnahme
- (5) Einschaltdauer
- (6) Antriebsschutzart
- (7) Sichere Arbeitslast / maximales Patientengewicht
- (8) Hersteller
- (9) Symbole (rechts angeordnet)



Konformitätskennzeichen nach Medizinprodukte-Richtlinie

IPX4

Schutz der elektrischen Ausstattung vor Spritzwasser



Medizinisches Anwendungsteil vom Typ B



Nur in trockenen Räumen verwenden



Schutzklasse II (doppelte Isolierung, schutzisoliert)



Produkt muss in der europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden. Produkt darf nicht über der getrennten Hausmüll entsorgt werden.




Symbol für maximales Patientengewicht



Symbol für sichere Arbeitslast



Symbol zum Beachten der Bedienungsanleitung

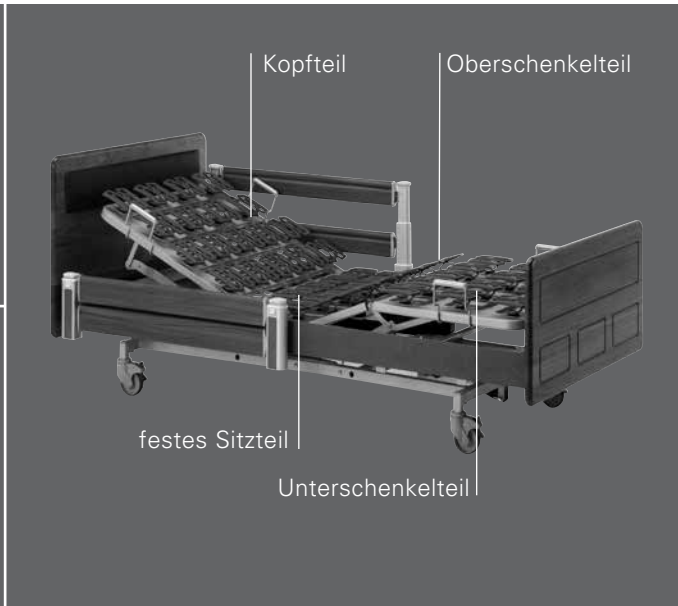

2. Allgemeine Funktionsbeschreibung

Konstruktiver Aufbau und Funktion

Die Liegefläche mit 4 Funktionsbereichen

Die Liegefläche besteht serienmäßig aus einem Komfort-Lattenrost (kann alternativ mit einer Metallliegefläche oder speziellen Federungssystemen versehen werden) und unterteilt sich in vier Funktionsbereiche: Rückenlehne, festes Sitzteil, Ober- und Unterschenkellehne.

Der umfassende Liegeflächenrahmen ist aus Stahlrohr geschweißt und mit einer PE-Pulverbeschichtung einbrennlackiert. Die elektrische, stufenlose Höhenverstellung der Liegefläche erfolgt durch 24 V-Gleichstrom-Motoren und wird über die leicht gängige Tastatur der Handschaltung gesteuert. Die Rückenlehne lässt sich elektrisch verstellen. Das Beinteil besteht aus einem zweigeteilten Fußbügel. Per Knopfdruck ist jede individuelle Position stufenlos über die Handschaltung einstellbar. Die Steuerung über die Elektronik-Handschaltung ermöglicht auch eine automatische 3-fach-Funktion zur Einstellung einer gestreckten Beinhochlagerung, zum Herznick und Knieknick. Bei Stromausfall kann das Rücken- und Beinteil über eine 9-Volt-Batterie abgesenkt werden.

Das Fahrgestell

Die Höhenverstellung der Betten erfolgt entweder über zwei höhenverstellbare Stellteile, oder über einen Grundrahmen mit Einzel- oder Doppelantrieb. Die Oberfläche dieser Stahlrohrkonstruktion ist mit PE-Pulverbeschichtung einbrennlackiert.

Das Seitengitter

Jedes Gesundheitsbett ist beidseitig mit je zwei integrierten Seitengittern in einer besonderen Sicherheitshöhe ausgestattet. Die Seitengitter sind durch eine Stahlschiene heb- und senkbar. Die Gleitstücke sind durch einen Aufschlagdämpfer besonders laufruhig, und die Enden sind mit einer schönen Verschlusskappe versehen. Über einen ergonomisch geformten Auslöseknopf lässt sich das Seitengitter leicht bedienen. Je nach Modell stehen kurz- bzw. lang geteilte Seitengittervarianten zur Verfügung.

Das geteilte Seitengitter*

Das Gesundheitsbett ist optional mit geteilten Seitengittern erhältlich. Die geteilten Seitengitter dienen dem Herausfallschutz und ermöglichen gleichzeitig ein sicheres und bequemes Ein- und Aussteigen. Durch einen einfachen Auslösemechanismus lässt sich jedes einzelne Seitengitterelement in eine hoch- oder tiefgestellte Position bringen.

* Nicht bei allen Modellreihen erhältlich.

Die Bedienung der auf- oder eingesteckten geteilten Seitengitter

Der Verriegelungsmechanismus der auf- oder eingesteckten geteilten Seitengitter befindet sich hinter der Metallblende, die unterhalb der Holzseitengitter sichtbar ist.

Sollen die geteilten Seitengitter heruntergelassen werden, muss jedes Element einzeln über den Verriegelungsmechanismus entriegelt werden.

Dafür mit einer Hand an die obere Kante des Seitengitters fassen. Mit der anderen Hand greifen Sie unter der Metallleiste unterhalb des Holzseitengitters hindurch und umfassen die bewegliche Griffleiste (Abb. 1). Die Griffleiste ist an der Griffseite mit einer Kante aus Gummi versehen. Drücken Sie nun die Griffleiste zusammen, um die Verriegelung der Seitengitter zu lösen (Abb. 2).

Ist die Verriegelung gelöst, nehmen Sie die Hand von der Griffleiste und senken Sie das Holzseitengitter ab, indem Sie es leicht nach vorn und unten bewegen (Abb. 3). Achten Sie darauf, dass Sie die Hand, die zuvor die Verriegelung gelöst hat, vor dem Absenken herausgezogen haben, da sie sonst durch das Holzseitengitter gequetscht werden kann!

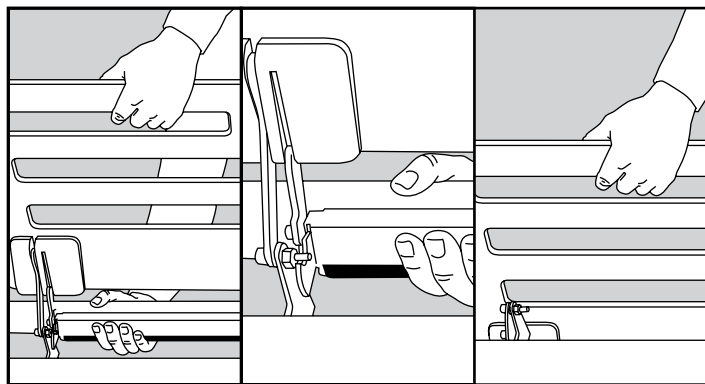


Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

* Bock-Gefahren-Hinweis

Bei der elektrischen Verstellung der Liegefläche ist darauf zu achten, dass der Bewohner/Patient keinen Kontakt zu den Seitengittern hat bzw. keine Gliedmaßen durch das Seitengitter ragen. Auch bei der Verstellung der Seitengitter selbst ist auf eine richtige Liegeposition der Pflegeperson zu achten.

> Bock-Top-Tipp

Sollte das Seitengitter aus der diagonalen Position (Abb. 3), nicht weiter abgesenkt sondern wieder hochgezogen werden, fassen Sie bitte den Knauf des Mittelpostens und ziehen diesen nach oben, bis das Seitengitter oben einrastet.



> Bock-Top-Tipp

Beim Einsatz unterschiedlicher Matratzenstärken darf die Mindesthöhe von 22 cm, gemessen von der oberen Kante des Seitengitters über der Matratze, ohne Kompression nicht unterschritten werden. Bei höheren Matratzen muss ein zusätzliches Aufsteckgitter verwendet werden, das als Zubehör erhältlich ist.

Verschiedene Gesundheitsbetten von Bock verfügen über Spezial-Funktionen, die Sie jeweils unter der Montageanleitung der einzelnen Modelle ab Kapitel 5 finden.

Anmerkung:

Wenn die Streben/Befestigungspunkte der Seitengitter außen sind (hellgraue Darstellung), dann ist unter den Seitengittern Abstand A zur Liegefläche verbindlich.

* Bock-Gefahren-Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Seitengitter nur von eingewiesenem Pflegepersonal bedient werden dürfen.

Bedienung der teleskopierbaren geteilten Seitengitters

Jedes Seitengitterelement kann unabhängig von den anderen Seitengitterteilen verstellt werden. Die Auslöseknöpfe für die Verstellung befinden sich einmal unten am Mittelpfosten und einmal oben am entsprechenden Endstück, direkt neben den Metallführungen für die Seitengitterholme.

Um ein Seitengitterelement abzusenken, fassen Sie bitte mit einer Hand am oberen Knauf des Mittelpfostens an, heben ihn leicht an und drücken mit der anderen Hand den Auslöseknopf am Mittelpfosten nach innen (Abb. 2). Das Seitengitter löst sich auf der entsprechenden Seite und lässt sich leicht bis zum Anschlag nach unten absenken. Das Seitengitter steht nun diagonal (Abb. 3).

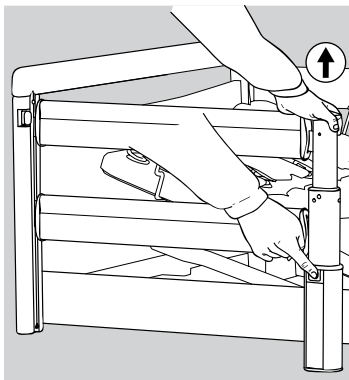


Abb. 2

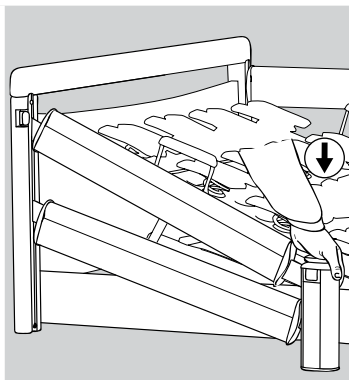


Abb. 3

Um auch die andere Seite abzusenken, fassen Sie bitte das Seitengitter an der Seite des Endstücks in der Griffnute an, lösen den Auslöseknopf am Endstück (Abb. 4) und senken das Seitengitter langsam nach unten ab. Das Seitengitter befindet sich nun in abgesenkter Position (Abb. 5).

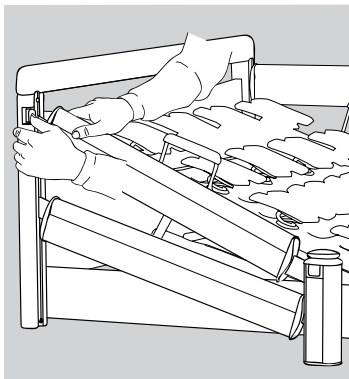


Abb. 4

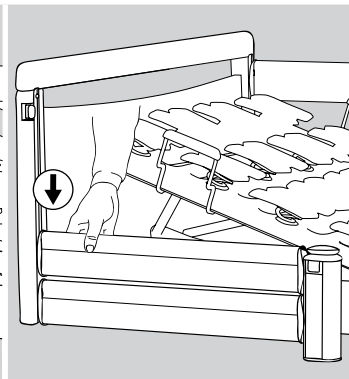


Abb. 5

Soll ein Seitengitterelement als Herausfallschutz in die obere Position gebracht werden, fassen Sie bitte mit beiden Händen den oberen Seitengitterholm mittig in der Griffnut an und ziehen ihn so weit nach oben, bis es an beiden Enden hörbar einrastet. Das Seitengitter befindet sich nun in hochgezogener Position (Abb. 6).

Die Bedienung der durchgehenden Seitengitter

Der Auslöseknopf für die Verstellung der durchgehenden Seitengitter befindet sich oben an den innenliegenden Seiten von Kopf- und Fußteil direkt neben den Metallführungen für die Seitengitterholme.

Sollen die Seitengitter heruntergelassen werden, fasst man in die dafür vorgesehene Griffnut des oberen Seitengitterholms (Abb. 1), hebt das Seitengitter leicht an und drückt einseitig den Auslöseknopf an Kopf- oder Fußteil (Abb. 2). Das Seitengitter löst sich auf der entsprechenden Seite und lässt sich leicht bis zum Anschlag nach unten absenken (Abb. 3). Das Seitengitter steht nun diagonal. Um auch die andere Seite abzusenken, müssen die vorher beschriebenen Schritte auf der gegenüberliegenden Seite ebenso vorgenommen werden. Das Seitengitter befindet sich nun in abgesenkter Position.

Sollen die Seitengitter als Herausfallschutz in die obere Position gebracht werden, fasst man den oberen Seitengitterholm mittig in der Griffnut an und zieht das Seitengitter so weit nach oben, bis es an beiden Enden hörbar einrastet. Das Seitengitter befindet sich nun in hochgezogener Position.

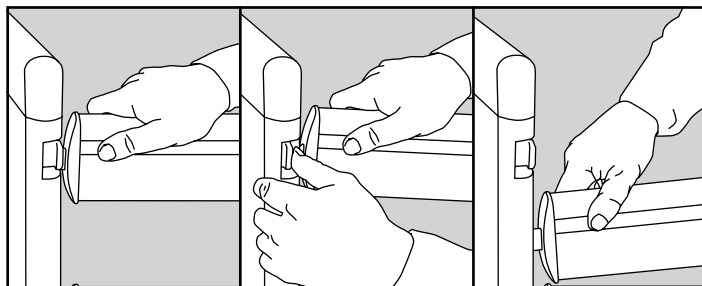


Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Die Seitengitter dienen in erster Linie dem Herausfallschutz. Bei sehr stark abgemagerten Pflegepersonen ist dieser Schutz durch die Seitengitter nicht mehr ausreichend gegeben, und es müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen z. B. durch ergänzende Anbringung einer aufschiebbarer Seitengitter-Abpolsterung (Zubehör) ergriffen werden.

Die Abstände der durchgehenden Seitengitter müssen kleiner als 12 cm sein. Bei Benutzung der durchgehenden Seitengitter dürfen diese nicht in Diagonalstellung verbleiben.

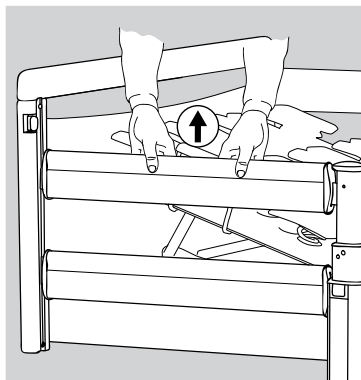


Abb. 6

* Bock-Gefahren-Hinweis

- Verwenden Sie nur Original-Bock-Seitengitter, die als Zubehör für jedes Gesundheitsbett erhältlich sind
- Verwenden Sie nur technisch einwandfreie und unbeschädigte Seitengitter mit den zulässigen Spaltmaßen.
- Achten Sie auf das sichere Einrasten der Seitengitter.
- Kontrollieren Sie vor der Anbringung des Seitengitters und jedem Neueinsatz alle mechanischen Teile am Bettgestell und Seitengitter, die für die Befestigung des Seitengitters sorgen, auf mögliche Beschädigungen.
- Die Bedienung der Seitengitter sollte immer mit großer Sorgfalt vorgenommen werden, da es schnell zu Quetschungen an den Fingern zwischen den Längsholmen kommen kann.

Bild 1: Durchgehendes Holz- / Stahlseitengitter, zweigeteilt

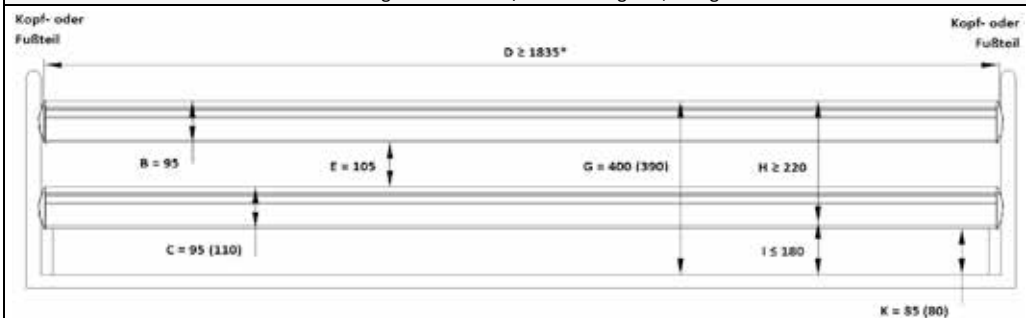


Bild 2: Durchgehendes Holz- / Stahlseitengitter, dreigeteilt

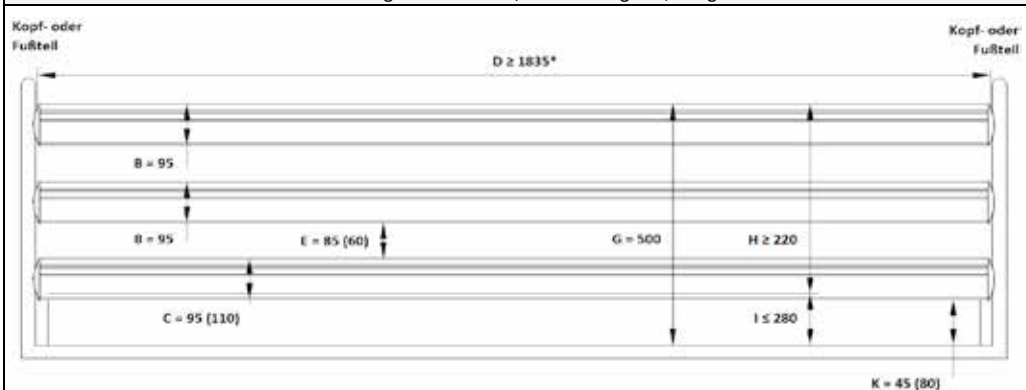


Bild 3: Holzseitengitter teleskopierbar, Duoposten mittig

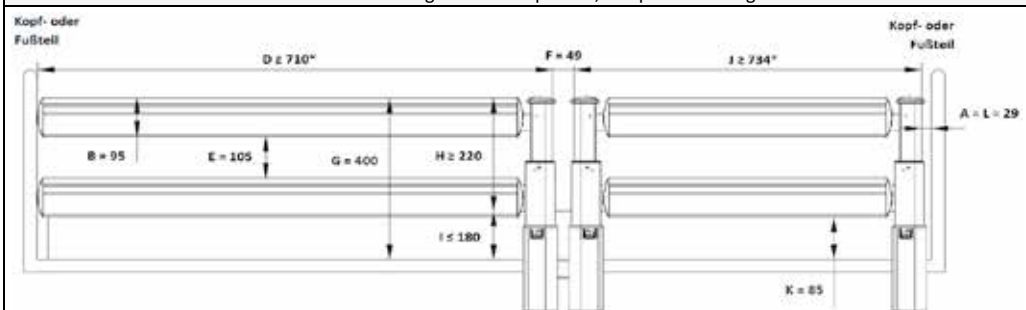


Bild 4: Holzseitengitter teleskopierbar, Soloposten mittig


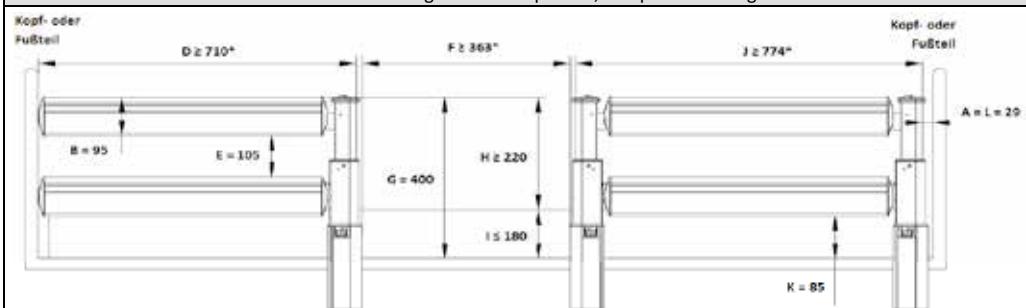


Bild 5: Holzseitengitter ein- / aufsteckbar

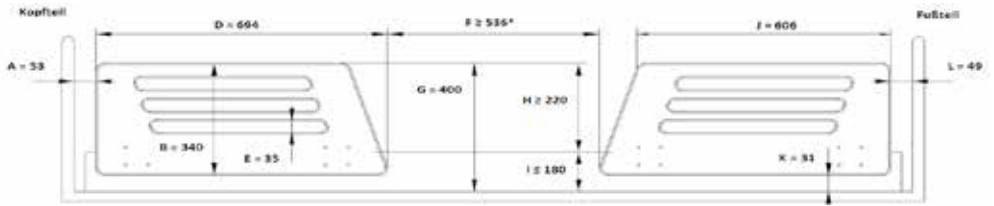

Beschreibung

Alle Maße in mm.

* Je nach Länge der Liegefläche

Der Einzelposten am Kopf- / Fußende ist optional.

Das Maß in Klammern gilt optional

Legende

Bereich	Beschreibung
A	Abstand zwischen Kopfteil und dem Seitengitter
B	Höhe 1 des Seitengitters
C	Hohe 2 des Seitengitters
D	Breite 1 des Seitengitters
E	Abstand zwischen Elementen innerhalb des Seitengitters
F	Abstand zwischen den geteilten Seitengittern
G	Abstand zwischen Liegefläche und oberen Kante des Seitengitters
H	Höhe der oberen Kante des Seitengitters über der Matratze ohne Kompression
I	Dicke der Matratze des bestimmungsgemäßen Gebrauchs
J	Breite 2 des Seitengitters
K	Kleinste Abmessung zwischen Seitengitter und Liegefläche (oder der Blende, falls vorhanden)
L	Abstand zwischen Fußteil und dem Seitengitter

Artikelnummern

Benennung	Art.Nr.
-----------	---------

Durchgehendes Holz- / Stahlseitengitter

Zweigeteilt (Bild 1)

Holzseitengitter (Satz: 95 / 95mm)	90223
------------------------------------	-------

Holzseitengitter (Satz: 95 / 110mm)	91247
-------------------------------------	-------

Stahlseitengitter (Satz: 95 / 110mm)	91314
--------------------------------------	-------

Dreigeteilt (Bild 2)

Holzseitengitter (Satz: 95 / 95mm)	91566
------------------------------------	-------

Holzseitengitter (Satz: 95 / 110mm)	91531
-------------------------------------	-------

Holzseitengitter teleskopierbar

Duoposten mittig (Bild 3)

Duoposten	91210
-----------	-------

Holzseitengitter Kopf (Satz: 95 / 95r	80344
---------------------------------------	-------

Holzseitengitter Fuß (Satz: 95 / 95n	80345
--------------------------------------	-------

Soloposten mittig (Bild 4)

Soloposten (Kopf rechts, Fuß links	91211
------------------------------------	-------

Soloposten (Kopf links, Fuß rechts	91212
------------------------------------	-------

Holzseitengitter (Satz: 95 / 95mm)	80346
------------------------------------	-------

Pfosten am Kopf- und Fußteil (ohne Bild)

Soloposten (Kopf rechts, Fuß links	91211
------------------------------------	-------

Soloposten (Kopf links, Fuß rechts	91212
------------------------------------	-------

Holzseitengitter durchg.(Satz: 95 / 95	80346
--	-------

Holzseitengitter ein- / aufsteckbar (Bild 5)

Beschlag einsteckbar	91264
----------------------	-------

Beschlag aufsteckbar	91260
----------------------	-------

Holzseitengitter	80118
------------------	-------

* Bock-Gefahren-Hinweis

Die maximale Einschalt-
dauer von 2 Minuten darf
nicht überschritten werden.
Eine anschließende Pause
von mindestens 18 Minuten
Dauer ist unbedingt einzu-
halten.



*9-V-Blockbatterie für die
Notabsenkung*

3. Elektrische Bauteile

3.1 Antrieb

Die Antriebseinheit besteht aus einem Doppelantrieb, in dem sich zwei separate Antriebseinheiten für die elektrisch bewegliche Verstellung von Rückenlehne und Beinlehne befinden. Zu der externen Ansteuerung gehören ein Schaltnetzteil mit einem Gleichrichter, in dem die Eingangsspannung in eine Niederspannung von 29 VDC Gleichstrom umgewandelt wird. Mit dieser ungefährlichen Kleinspannung arbeiten die Motoren und der Handschalter. Die Kabel sind doppelt isoliert, und der Netzstecker verfügt über eine Primärsicherung.

Die interne Notabsenkung erfolgt über eine 9-V-Blockbatterie. Außerdem sorgt eine Leistungsanpassung für konstante Funktionsgeschwindigkeit. Die Sicherheitsleistungen entsprechen damit der Schutzklasse II und der Feuchtigkeitsschutz der Schutzart IPX4.

Die maximale Einschaltdauer ist am Bett (Typenschild) angegeben. Z. B. 10% (2 min. ON / 18 min. OFF) bedeutet, dass jede elektronische Verstellung max. 2 min. in 18 min. betrieben werden darf (Überhitzungsschutz).

Sollte die maximale Verstellzeit von zwei Minuten, z. B. durch dauerndes Spielen an dem Handschalter, überschritten werden und es zu einer Überhitzung der Stellmotoren kommen, schaltet die Thermosicherung die Stromversorgung sofort komplett vom Bett ab. Nach einer Abkühlzeit von ca. einer Stunde wird die Stromversorgung automatisch wieder angestellt.

3.2 Sperreinrichtung für alle Funktionen

Der Serien-Handschalter mit 6 Tasten ist mit einer integrierten Sperreinrichtung versehen, die es dem Pflegepersonal ermöglicht, über einen Schlüssel den Handschalter komplett für seine Bedienung zu sperren.

3.3 Antrieb zur Niveaueinstellung

Die Niveaueinstellung des Hubgestells erfolgt über einen eingebauten Gleichstrom-Einzelantrieb, dessen Verstellbereich über einen integrierten Endschalter bestimmt ist. Der Antrieb zur Niveaueinstellung ist über eine Wendelleitung mit der Steuerbox verbunden.

3.4 Der abschließbare Handschalter, Erstfehlersicher

Über den ergonomisch geformten Handschalter sind die Basisfunktionen per Fingerdruck auf die sechs extra großen, sicher zu bedienenden Bedientasten steuerbar. Die einzelnen Bedientasten sind mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Die Stellmotoren laufen so lange, wie eine entsprechende Taste gedrückt gehalten wird. Ein gewendelttes Kabel bietet den nötigen Bewegungsfreiraum bei der Bedienung.

Die rückseitig montierte Aufhängungsvorrichtung ist beidseitig um 90° drehbar. Der Radius entspricht dabei genau dem Radius des Seitengitters und des Aufrichters, so dass keine wackeligen Spielräume vorhanden sind. Besonders bei der Reinigung und der Pflege kann die mögliche störende Position des Handschalters durch einfache Drehung oder das einfache Anclipsen an einer beliebigen Stelle des Bettes vermieden werden.



Der Bock-Handscharter

Bedienknopf 1	Rückenteil nach oben
Bedienknopf 2	Rückenteil nach unten
Bedienknopf 3	Unterschenkelteil nach oben
Bedienknopf 4	Unterschenkelteil nach unten
Bedienknopf 5	Liegefläche nach oben
Bedienknopf 6	Liegefläche nach unten

> Bock-Top-Tipp



Antriebe mit E-Trafo 24 V:
Durch den geringen Stand-by-Verbrauch (max. 0,5 W) und den optimierten Wirkungsgrad des Netzteils ist das Bett äußerst sparsam im Energieverbrauch.

Antriebe mit NFS:
Durch die Netzfreeschaltung ist das Bett völlig frei von Elektrosmog und äußerst sparsam im Energieverbrauch, da nur dann Strom verbraucht wird, wenn Verstellfunktionen ausgeführt werden.

* Bock-Gefahren-Hinweis

Der hohe Sicherheitsstandard der Gesundheitsbetten von Hermann Bock ist nicht gleichbedeutend mit dem Ausschluss jeden Risikos. Durch die genaue Beachtung aller Herstellerangaben und den bestimmungsgemäßen Gebrauch erfüllen die Sicherheitsmaßnahmen erst ihren eigentlichen Zweck und dienen dann vorbeugend und aktiv der Vermeidung jeden Risikos.

Der Handschalter verfügt darüber hinaus über eine integrierte Sperreinrichtung, die mittels des dazugehörigen Schlüssels aktiviert und deaktiviert werden kann. Zur Sperrung der kompletten elektrischen Funktion den Schlüssel in das rückseitig befindliche Sperrschloss stecken und mit einer entsprechenden Drehung des Schlüssels die Sperrfunktion ein- oder ausschalten.

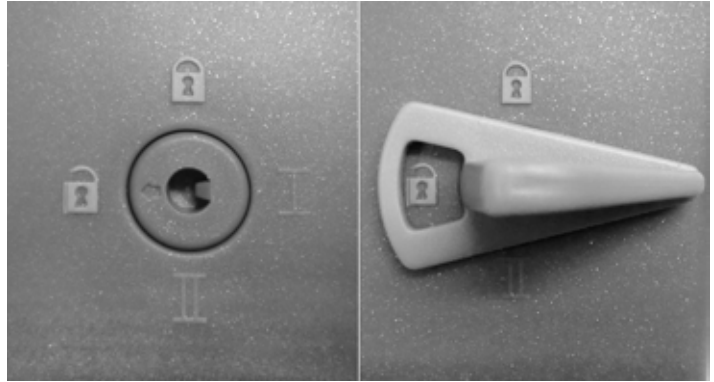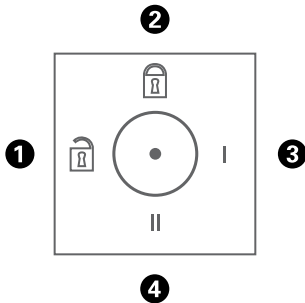

Schlüssel für die Sperreinrichtung

- | | |
|------------------------|--|
| Schalterstellung 1 | Handschalterfunktionen ausführbar |
| Schalterstellung 2 & 4 | Handschalterfunktionen deaktiviert |
| Schalterstellung 3 | Freigabe der Trendelenburgfunktion
(bei Betten mit Trendelenburgfunktion) |

3.5 Vorsicht: Elektrischer Antrieb


Die elektrisch betriebenen Pflege- und Therapiebetten werden von Hermann Bock Gesundheitsbetten genannt, weil sie es der pflegebedürftigen Person durch ihre vielfältigen Funktionen ermöglichen, den Gesundungsprozess psychisch und physisch wesentlich zu unterstützen und gleichzeitig Schmerzen zu lindern. Als Medizinprodukte bedürfen elektrisch betriebene Betten besonderer Sorgfaltspflege hinsichtlich der ständigen Sicherheitskontrollen. Dazu gehören der sicherheitsgerechte Umgang mit dem Bett, die tägliche Überprüfung der elektrischen Ausrüstung und die ordnungsgemäße Wartung und Reinigung.

Zur Vermeidung von Beschädigungen der Leitungen sollte die Kabelverlegung außerhalb des Bereiches, in dem Beschädigungen auftreten können, erfolgen. Ebenfalls sollten Berührungskontakte mit kantigen Teilen vermieden werden. Hinweise zur adäquaten Kabelverlegung finden Sie in Kapitel 5. Zur Vermeidung von Verletzungsgefahren durch einen elektrischen Schlag sollten die Möglichkeiten für eine zu hohe Berührungsspannung ausgeschlossen werden. Diese Umstände sind besonders dann gegeben, wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wurde, unzulässige und zu hohe Ableitströme vorliegen oder Flüssigkeit in das Motorgehäuse eingedrungen ist, z. B. durch unsachgemäße Reinigung. Durch diese Beschädigungen kann es zu Fehlfunktionen der Steuerung und als Folge davon zu ungewollten Bewegungen der einzelnen Bettelemente kommen, die ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die Pflegeperson und Anwender bergen.



* Bock-Gefahren-Hinweis

Bei gleichzeitigem Gebrauch von elektrischen Geräten kann es besonders in der direkten Umgebung des betriebsbereiten Bettes zu kleinen elektromagnetischen Wechselwirkungen dieser Elektrogeräte kommen, wie z.B. Rauschgeräusche im Radio. Vergrößern Sie in solchen seltenen Fällen den Geräteabstand, benutzen Sie nicht die gleiche Steckdose oder schalten Sie das störende bzw. das gestörte Gerät vorübergehend aus.


Sollte das Bett entgegen seiner Zweckbestimmung mit elektrischen, medizinischen Geräten betrieben werden, müssen vorher die Funktionen des Bettes über die integrierte Sperrfunktion im Handschalter für die Dauer der Anwendung deaktiviert werden.

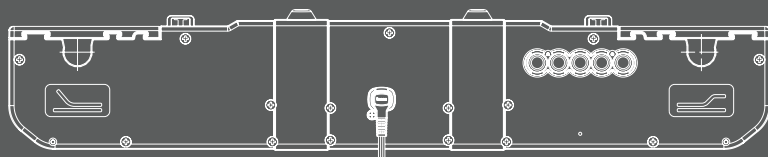

MD2xx

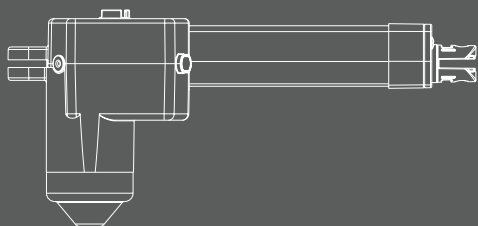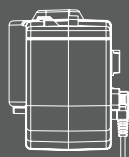

MD1xx

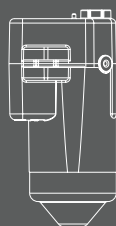

* Bock-Gefahren-Hinweis

Alle Antriebskomponenten dürfen nicht geöffnet werden!

Die Störungsbehebung oder der Austausch von einzelnen elektrischen Bauelementen dürfen ausschließlich von speziell autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

4. Die Antriebe

4.1 Die 24 Volt Antriebe

Hermann Bock rüstet Gesundheitsbetten mit verschiedenen Antriebssystemen der Firma Limoss aus.

4.1.1 Die Antriebssysteme

Der Doppelantrieb zur stufenlosen Verstellung für Liegeflächen und der Linearantrieb als Einzelantrieb zur Höhenverstellung der Hubgestelle bestehen jeweils aus vier Hauptkomponenten.

- Gehäuse
- Motor
- Getriebe
- Spindel mit Mutter

Das Gehäuseprinzip des Doppelantriebs und des Einzelantriebs gewährleistet die dauerhafte Funktion aller Antriebskomponenten. Das spezielle Konstruktionsprinzip basiert auf zwei kräteaufnehmenden Gehäuseschalen. Der patentierte Aufbau des Gehäuseinneren schafft durch eine detaillierte Innenkonstruktion eine wesentliche Voraussetzung für die passgenaue Aufnahme der Antriebstechnik.

Vorgefertigte Komplettbaugruppen kommen nicht zum Einsatz. Besonders einfache Montage/Demontage und bequemer Einbauraum für Notabsenkungsbatterie und Steuerelektronik über dem kräftigen Seitenschieber zeichnen das Gehäuse des Doppelantriebs aus. Der Antrieb verfügt über eine Primärsicherung im Netzstecker und eine Notabsenkung.

4.1.2 Das externe Schaltnetzteil SMPS

Das SMPS-Steckernetzteil (Switch-Mode-Power-Supply) ist ein elektronischer Trafo, der sich bei Belastung nur wenig erwärmt und eine elektronische Leistungsüberwachung eingebaut hat. Daraus ergeben sich eine konstante Spannung bis zur Grenzlast (kein Geschwindigkeitsverlust) und ein hoher Schutz gegen Überlast. Der externe Trafo bietet Sicherheit ab der Steckdose, da er dort die Netzspannung direkt in die 29 V Kleinspannung umwandelt, mit der das Bett betrieben wird. Er ist mittels einer Steckerkupplung mit dem Netzzuleitungskabel verbunden, so dass er sich bei Defekt separat austauschen lässt.


Das Steckernetzteil entspricht den kommenden europäischen Richtlinien für elektrische Haushaltsgeräte und weist deshalb auch im Standby-Modus einen geringen Energieverbrauch von max. 0,5 Watt auf und ist bei variablen Eingangsspannungen von 100 V bis 264 V international einsetzbar. Elektromagnetische Wechselfelder sind am SMPS-Netzteil nicht messbar und bei Betrieb (durch die sehr kleine Gleichspannung) noch geringer als bei Netzfreeschaltungen.

> Bock-Top-Tipp


Die 9-Volt-Batterien in der Steuerung sollten einmal jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden und bei Bedarf gewechselt werden. Darüber hinaus sind regelmäßige Sichtkontrollen durchzuführen.



Das externe Schaltnetzteil

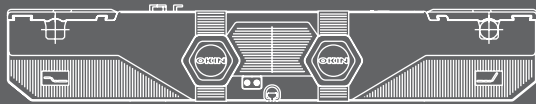

IlcoFlexx 581

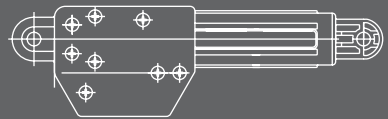

IlcoDrive EZ

* Bock-Gefahren-Hinweis

Alle Antriebskomponenten dürfen nicht geöffnet werden! Die Störungsbehebung oder der Austausch von einzelnen elektrischen Bauelementen dürfen ausschließlich von speziell autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Entsprechende Hinweise zur Montage und Demontage finden sich in der Broschüre „Nachrüsten mit Bock“ im Teil II – Anweisungen für Elektrofachkräfte.

4.2 Die Antriebe mit Netzfreeschaltung

ILCON verfügt als führender Hersteller von Verstellsystemen über kompetente Leistungsfähigkeit und überzeugendes Know-how. Eine ideale Partnerschaft für Medizinprodukte, die durch diese Synergie eine einzigartige Qualität erreichen.

4.2.1 Doppelantriebssysteme

Der Doppelantrieb zur stufenlosen Verstellung für Liegeflächen und der Linearantrieb als Einzelantrieb zur Höhenverstellung der Hubgestelle bestehen jeweils aus vier Hauptkomponenten.

- Gehäuse
- Motor
- Getriebe
- Spindel mit Mutter

Das Gehäuseprinzip des Doppelantriebs und des Linearantriebs gewährleistet die dauerhafte Funktion aller Antriebskomponenten. Das spezielle Konstruktionsprinzip basiert auf zwei kräteaufnehmenden Gehäuseschalen.

Der Aufbau des Gehäuseinneren schafft durch eine detaillierte Innenkonstruktion eine wesentliche Voraussetzung für die passgenaue Aufnahme der Antriebstechnik. Besonders einfache

Montage/Demontage und bequemer Einbauraum für Akku und Elektronik über dem kräftigen Klappdeckel zeichnen das Gehäuse des Dopelantriebs aus. Auch als Zusatzantrieb ist der Doppelantrieb mit allen ILCON-Steuerungen kombinierbar. Der Doppelantrieb verfügt über eine Netzfreeschaltung im Netzstecker und eine Notabsenkung.

4.2.2 Die Netzfreeschaltung

Die integrierte ILCON-Netzfreeschaltung im Netzstecker bietet neben einer hohen Sicherheitsgarantie weitere praktische Vorteile im Einsatz. Im netzfreeschalteten Zustand verhindert die Netzfreeschaltung magnetische und elektrische Wechselfelder im Bett. Die Netzfreeschaltung arbeitet netzunabhängig und benötigt für ihr „Stand-by“ keinen zusätzlichen Trafo. Bei freigeschaltetem Antrieb wird kein Strom verbraucht, und ein Schaltungsgeräusch im Relais signalisiert die richtige Bedienung. Selbstverständlich ist die Netzfreeschaltung mit übergeordneten Netzfreeschaltern kompatibel.

Die ILCON-Netzfreeschaltung im Netzstecker wird durch das Drücken der Handschaltertaste aktiviert. Ein mit Gleichstrom geladener Kondensator im Antrieb führt dem 2-poligen Relais in der Netzfreeschaltung Strom zu und schaltet den Transformator im Antrieb ein. Dabei wird der Kondensator wieder aufgeladen und ist für die nächste Betätigung vorbereitet. Nach jedem Loslassen der Handschaltertaste schaltet das Relais in der Netzfreeschaltung das Hausnetz 2-polig ab. Ein Schaltgeräusch signalisiert die Ausführung dieser Funktion.

Die serienmäßig in der Steuerung installierte 9-Volt-Batterie für die Notbewegung puffert im Bedarfsfall den Kondensator der Netzfreeschaltung, wenn dieser lange Zeit nicht beansprucht wurde und dadurch seine Spannung verloren hat. Sollten der Kondensator und die 9-Volt-Pufferbatterie verbraucht sein, genügt ein Druck auf die grüne Taste, und die Netzfreeschaltung arbeitet wieder normal. Bei jeder Außerbetriebnahme des Bettes muss der Kontakt zur 9-Volt-Pufferbatterie durch Abziehen der Steckvorrichtung gelöst werden.

> Bock-Top-Tipp

Die 9-Volt-Batterien in der Steuerung sollten einmal jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden und bei Bedarf gewechselt werden. Darüber hinaus sind regelmäßige Sichtkontrollen durchzuführen.



9-V-Blockbatterie für die Notabsenkung



Netzfreeschaltung

Steckervarianten

4.2.3 Das ICS Antriebssystem

Intelligente Kontrollsysteme (ICS) sind in der Lage, Komponenten und Parameter eines Bettes zuverlässig zu steuern und zu überwachen. Durch die individuelle Abstimmung von über 100 Parametern kann diese Mikroprozessorsteuerung perfekt an Ihre Anwendungen angepasst werden.

Das ICS System erkennt automatisch um welches System es sich handelt und verwendet die vorab hinterlegten systembezogenen Parameter.

Produktmerkmale:

- Softcontrol
- Synchronlauf
- Memory-Funktion
- Sonderfunktionen und Ablaufsteuerung, z.B. Wartungsposition oder Parallelverstellung aller 4 Motoren z.B. für Sitzposition
- Modularer Aufbau, d.h. Sonderfunktionen auf Kundenwunsch programmierbar
- Einfach programmierbar, ca 100 Parameter (vor)einstellbar
- Sichere Abschaltung und Endlagerposition, z.B. Schutz vor Kollision

Das System verfährt unerlaubt

Verfährt das System unerlaubt, z.B. zu früh in die Neigung, so liegt ein Verlust der Position vor. Dies kann z.B. durch austauschen der Antriebe auftreten. Um den Fehler zu beheben muss eine Initialisierung durchgeführt werden. Die Initialisierung wird mit einer Tastenkombination durchgeführt, dabei wird das dritte Tastenpaar von Oben verwendet (Autokontur). Die beiden Tasten werden gedrückt und bis zur vollständigen Initialisierung festgehalten. Nach etwa fünf Sekunden fahren alle Antriebe mit der halben Geschwindigkeit runter. Wegen der halben Geschwindigkeit ist es möglich, Kollisionen rechtzeitig.


Zurücksetzen der Position nach dem Auslösen der MSE

Nach dem Auslösen der mechanischen Schnellentriegelung stimmt die Position des Antriebes nicht mehr mit der gespeicherten Position überein. Aus diesem Grund muss der betroffene Antrieb zurück auf den Null-Wert gesetzt werden. Dazu wird die Taste „runter“ des entsprechenden Antriebs betätigt, bis der Antrieb den unteren Endschalter erreicht hat. Der Antrieb wurde erfolgreich zurückgesetzt und kann jetzt wie gewohnt verfahren werden.

5. Aufbau und Bedienung

5.1 Technische Daten

Technische Daten									
	belluno	livorno / livorno niedrig	livorno hydraulik	verona / verona niedrig	combiflex / combiflex.fc	practico	practico 25/80	practico comfort	practico economic
Liegeflächenmaß: cm	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200
Außenmaß: cm	103 x 213	105 x 212	105 x 212	105 x 212	103 x 203	105 x 212	105 x 210	105 x 210	105 x 210
sichere Arbeitslast: kg	200	200	200	200	220	220	220	220	220
max. Personengewicht: kg	165	165	165	165	185	185	185	185	185
Höhenverstellung: cm	37 - 82,5	37 - 83 / 28,5 - 72,5	38 - 80	39 - 81 / 28,5 - 72,5	38 - 81	38 - 81	25 - 80	25 - 80	25 - 80
max. Einstellwinkel zur Horizontalen:									
- Rückenleil	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°	70°
- Unterschenkelteil	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°
- Trendelenburg-Position (optional)	n.möglich	n.möglich	n.möglich	n.möglich	15°	15°	15°	15°	15°
Seitengitterhöhe mit Federleisten: cm	39	40	40	40	39 / 40	40	40	40	39
Seitengitterauswahlmöglichkeiten:									
- Durchgehendes Holz- / Stahlseitengitter	•	•	•	•	•	•	•	n.möglich	•
- Holzseitengitter teleskopierbar geteilt	n.möglich	•	•	•	•	•	•	n.möglich	n.möglich
- Holzseitengitter ein- / aufsteckbar	n.möglich	n.möglich	n.möglich	n.möglich	n.möglich	n.möglich	n.möglich	•	n.möglich
Lifterunterfahrbarkeit: cm	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Schallpegel: dB(A)	< 65	< 65	< 20	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65	< 65
Gewichte:									
Gesamt inkl. durchg. Holzseitengitter: kg	98	109	110	116	80	147	147	157	157
Liegefläche: kg	38	42	42	42	38	50	50	50	50
Untergestell: kg	37	37 / 39	39	45	42	53	53	53	53
Holzendstück: kg	12	10	10	10	10	12,5	12,5	12,5	12,5
Durchgehendes Holzseitengitter: kg/Satz	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	n.möglich	11,5
Durchgehendes Stahlseitengitter: kg/Satz	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	n.möglich	15,8
Holzseitengitter teleskopierbar: kg/Satz	n.möglich	18	18	18	18	18	18	n.möglich	n.möglich
Holzseitengitter ein- / aufsteckbar: kg/Satz	n.möglich	n.möglich	n.möglich	n.möglich	n.möglich	n.möglich	n.möglich	22	n.möglich
Sondermaße: Länge: cm	180 - 220	180 - 220	180 - 220	180 - 220	190 - 220	190 - 220	200 - 220	200 - 220	200 - 220
Sondermaße: Breite: cm	80 - 140	80 - 140	80 - 140	n.möglich	80 - 140	90 - 120	90 - 120	90 - 120	90 - 120
Elektrische Daten									
Hersteller	IIcon	Eingang Spannung: V	230		230	230	230	230	230
		Frequenz: Hz	50	50	50	50	50	50	50
		max. Stromaufnahme: A	2	2	2	2	2	2	2
L'moss	Eingang Spannung: V		100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
		Frequenz: Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
		max. Stromaufnahme: A	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

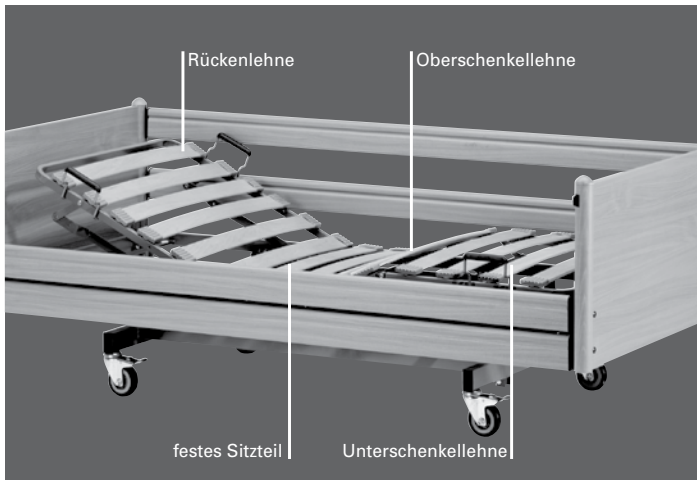

5.2 belluno

belluno ist der Klassiker im täglichen Dauereinsatz in Reha- und Pflegeeinrichtungen sowie in der häuslichen Pflege. belluno bietet den gebrechlichen Menschen, pflegebedürftigen Kranken und Menschen mit Behinderung einen hohen Liegekomfort und unterstützt durch seine leichte Bedienung gleichzeitig die optimale Pflege.

- > belluno ist nicht für den Krankenhaus-Einsatz geeignet.
- > belluno ist für den Transport von Patienten geeignet. Das Pflegebett ist während der Lagerung des Patienten fahrbar. Zur Vorbereitung dazu die Rollen feststellen, die Liegefläche in die unterste waagerechte Position verfahren. Die Rollen lösen und das Bett verschieben. Nach dem Transport die Rollen feststellen.
- > belluno ist für pflegebedürftige Personen ab 12 Jahren mit einer Körpergröße ab 150 cm geeignet.
- > belluno kann unter Umständen (bei Bedarf) zu medizinischen Zwecken mit weiteren elektrischen medizinischen Geräten (z.B. Absauggeräte, Ultraschallvernebler, Ernährungssysteme, Antidekubitussysteme, Sauerstoffkonzentratoren usw.) betrieben werden. In diesem Fall müssen alle Bettfunktionen für die Dauer der Anwendung über die integrierte Sperreinrichtung deaktiviert werden.

Achtung: Das Bett hat keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen Potenzialausgleich. Medizinische elektrische Geräte, die intravaskular oder interkardial mit dem Patienten verbunden sind, dürfen nicht verwendet werden. Der Betreiber der Medizinprodukte trägt die Verantwortung, dass die Kombination der Geräte die Anforderungen der EN 60601-1:2006 erfüllt.

Besondere Merkmale

belluno bietet moderne, verlässliche Technik mit leichter Bedienung in verschiedenen Funktionsvarianten.

belluno ist wahlweise mit einer 4- oder 5-geteilten Funktion der Liegefläche erhältlich. Die elektrische Verstellung des Rückenteils der Liegefläche erfolgt über die Handschaltung. Bei der 4- und 5-geteilten Liegefläche erfolgt die elektrische Bedienung von Rücken- und Beinteil über die Handschaltung mit automatischer 3fach-Verstellung.



belluno wird betriebsbereit

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sind alle Verpackungsreste vollständig zu entfernen.

1. Die Bindevorrichtungen an der Transportverpackung lösen.
2. Das Untergestell mit Schere frei hinstellen und die Rollen feststellen.
3. Bei Montage der geteilten Liegefläche zunächst die Schere mittels des Kastenmotors auf Kniehöhe fahren. Dann das kopfseitige Liegeflächenelement auf die Kugellager bringen und danach das fußseitige Liegeflächenelement mittels der Splintbolzen befestigen. Die Splintbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen mit dem Federstecker sichern. Die beiden Liegeflächenelemente zusammenstecken und mit den zuvor entfernten Schrauben beidseitig fest mit dem beiliegenden Imbusschlüssel verschrauben. Den Motor entsprechend den Kennzeichnungen (Kopf-Fußseite) einhängen und schließen.
4. Bei Montage der ungeteilten Liegefläche müssen die Kugellager im oberen Bereich der Schere in das dafür vorgesehene U-Profil am unteren Ende der Liegefläche eingeführt werden. Die Federstecker am Untergestell entfernen. Die Liegefläche zwischen den beiden Laschen mit dem zuvor entfernten Splintbolzen arretieren. Die Splintbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen mit dem Federstecker sichern.



5. Das Netzkabel muss mit der am Kabel vorhandenen Zugentlastung an die Lasche der Liegefläche geschraubt werden. Den Netzstecker anschließen. Den Hubmotor an den Liegeflächenmotor anschließen.
6. Ein Endstück auf einer Seite komplett aufschieben. Der Auslöseknopf muss hierbei in der Bohrung der Liegefläche einrasten. Das zweite Endstück nur bis direkt vor den Auslöseknopf aufschieben.
7. Dann die Seitengitter in die vormontierten Metallführungen einhängen und vermitteln.

BEACHTEN Sie unbedingt die Beschriftung oben und unten an den Endkappen der Seitengitter, da diese nicht verwechselt werden dürfen.

8. Den Auslöseknopf herunterdrücken und das zweite Endstück so weit einschieben, bis er in die dafür vorgesehene Bohrung fest einrastet.
9. Nach dem Aufbau bzw. vor Inbetriebnahme des Bettes den Verstellbereich der Liegefläche über die Steuerung abfahren, um die optimale Positionierung der Kabel zu prüfen. Der Verstellbereich muss ohne Hindernisse passierbar sein. Das Netzkabel muss dabei außerhalb des Bettes verlaufen und die Handschaltung frei liegen.

belluno ist nun betriebsbereit!





5.3 livorno / livorno niedrig / livorno hydraulik

Sinn und Zweck

livorno, livorno niedrig und livorno hydraulik wurden speziell für die Anforderungen des täglichen Dauereinsatzes in Reha- und Pflegeeinrichtungen sowie in der häuslichen Pflege konzipiert. Sie bieten den gebrechlichen Menschen, pflegebedürftigen Kranken und Menschen mit Behinderung eine besonders wohnliche Umgebung, komfortable Bedingungen und unterstützen gleichzeitig die optimale Pflege.

- > livorno, livorno niedrig und livorno hydraulik sind nicht für den Krankenhaus-Einsatz geeignet.
- > livorno, livorno niedrig und livorno hydraulik sind für den Transport von Patienten geeignet. Die Pflegebetten sind während der Lagerung des Patienten fahrbar. Zur Vorbereitung dazu die Rollen feststellen, die Liegefläche in die unterste waagerechte Position verfahren. Die Rollen lösen und das Bett verschieben. Nach dem Transport die Rollen feststellen.
- > livorno, livorno niedrig und livorno hydraulik sind für pflegebedürftige Personen ab zwölf Jahren mit einer Körpergröße ab 150 cm geeignet.
- > livorno, livorno niedrig und livorno hydraulik können unter Umständen (bei Bedarf) zu medizinischen Zwecken mit weiteren elektrischen medizinischen Geräten (z.B. Absauggeräte, Ultraschallvernebler, Ernährungssysteme, Antidekubitussysteme, Sauerstoffkonzentratoren usw.) betrieben werden. In diesem Fall müssen alle Bettfunktionen für die Dauer der Anwendung über die integrierte Sperreinrichtung deaktiviert werden.

Achtung: Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen Potenzialausgleich. Medizinische elektrische Geräte, die intravaskular oder interkardial mit dem Patienten verbunden sind, dürfen nicht verwendet werden. Der Betreiber der Medizinprodukte trägt die Verantwortung, dass die Kombination der Geräte die Anforderungen der EN 60601-1:2006 erfüllt.

Besondere Merkmale

livorno, livorno niedrig und livorno hydraulik verfügen über ausgereifte Technik und sind durch die Auswahl an Dekorelementen besonders gut in bestehende Wohnbereiche integrierbar.

Die Liegefläche ist wahlweise mit einer 4- oder 5-geteilten Funktion erhältlich. Bei der Liegefläche erfolgt die elektrische Bedienung von Rücken- und Beinteil über die Handschaltung, wobei das Beinteil mit automatischer 3fach-Verstellung ausgestattet ist.

livorno, livorno niedrig und livorno hydraulik **werden betriebsbereit**


Bevor Sie mit der Montage beginnen, sind alle Verpackungsreste vollständig zu entfernen.

1. Die Bindevorrichtungen an der Transportverpackung lösen.
2. Das Untergestell mit Schere frei hinstellen und die Rollen feststellen. Zur Vereinfachung der Montage empfehlen wir die Schere zunächst durch Anschluß an den Liegeflächenmotor bis zur Kniehöhe hochzufahren.
3. Bei Montage der Liegefläche müssen die Kugellager im oberen Bereich der Schere in das dafür vorgesehene U-Profil am unteren Ende der Liegefläche eingeführt werden. Die Federstecker am Untergestell entfernen. Die Liegefläche zwischen den beiden Laschen mit dem zuvor entfernten Splintbolzen arretieren. Die Splintbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen mit dem Federstecker sichern.
4. Das Netzkabel muss mit der am Kabel vorhandenen Zugentlastung an die Lasche der Liegefläche geschraubt werden. Den Netzstecker anschließen. Den Hubmotor an den Liegeflächenmotor anschließen.
5. Die Seitenblenden mit den beiliegenden Schrauben an die Längszargen montieren.

Das livorno hydraulik wird gleichermaßen montiert ohne die elektrische Ausstattung.

Weiterer Montageverlauf wie im Kapitel 5.7 beschrieben.



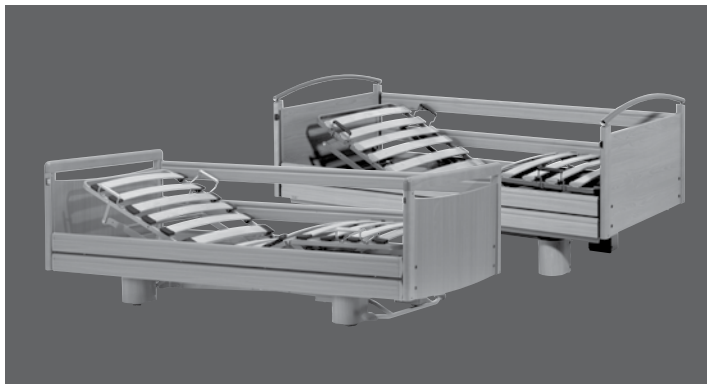

5.4 verona / verona niedrig

verona und verona niedrig wurden speziell für die Anforderungen des täglichen Dauereinsatzes in Reha- und Pflegeeinrichtungen sowie in der häuslichen Pflege konzipiert. Sie bieten den gebrechlichen Menschen, pflegebedürftigen Kranken und Menschen mit Behinderung eine besonders wohnliche Umgebung, komfortable Bedingungen und unterstützen gleichzeitig die optimale Pflege.

- > verona und verona niedrig sind nicht für den Krankenhaus-Einsatz geeignet.
- > verona und verona niedrig sind nicht für den Transport des Patienten geeignet. Die Betten sind lediglich dafür bestimmt, innerhalb des Patientenzimmers, zur Reinigung oder für den Zugang zum Patienten bewegt zu werden.
- > verona und verona niedrig sind für pflegebedürftige Personen ab zwölf Jahren mit einer Körpergröße ab 150 cm geeignet.
- > verona und verona niedrig können unter Umständen (bei Bedarf) zu medizinischen Zwecken mit weiteren elektrischen medizinischen Geräten (z.B. Absauggeräte, Ultraschallvernebler, Ernährungssysteme, Antidekubitusssysteme, Sauerstoffkonzentratoren usw.) betrieben werden. In diesem Fall müssen alle Bettfunktionen für die Dauer der Anwendung über die integrierte Sperreinrichtung deaktiviert werden.

* Bock-Gefahren-Hinweis

Die Seitenblenden sind unverzichtbar für einen normkonformen Seitengitterabstand. Das Bett darf ohne Seitengitter nicht betrieben werden.

Dies gilt nicht für Bettenmodelle mit tiefer angesetzten Endstücken und entsprechend erhöhten Seitengitterholmen.

Achtung: Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen Potenzialausgleich. Medizinische elektrische Geräte, die intravaskular oder interkardial mit dem Patienten verbunden sind, dürfen nicht verwendet werden. Der Betreiber der Medizinprodukte trägt die Verantwortung, dass die Kombination der Geräte die Anforderungen der EN 60601-1:2006 erfüllt.

Besondere Merkmale

verona und verona niedrig verfügen über ausgereifte Technik und sind durch die Auswahl an Dekorelementen besonders gut in bestehende Wohnbereiche integrierbar.

Die Liegefläche von verona und verona niedrig ist wahlweise mit einer 4- oder 5-geteilten Funktion der Liegefläche erhältlich. Bei der Liegefläche erfolgt die elektrische Bedienung von Rücken- und Beinteil über die Handschaltung, wobei das Beinteil mit automatischer 3fach-Verstellung ausgestattet ist.


verona und verona niedrig werden betriebsbereit

Bevor Sie mit der weiteren Montage fortfahren, sind alle Verpackungsreste vollständig zu entfernen.

1. Die Bindevorrichtungen an der Transportverpackung lösen.
2. Das Untergestell mit Schere frei hinstellen und die Rollen feststellen. Zur Vereinfachung der Montage empfehlen wir die Schere zunächst durch Anschluß an den Liegeflächenmotor bis zur Kniehöhe hochzufahren.
3. Bei Montage der Liegefläche müssen die Kugellager im oberen Bereich der Schere in das dafür vorgesehene U-Profil am unteren Ende der Liegefläche eingeführt werden. Die Federstecker am Untergestell entfernen. Die Liegefläche zwischen den beiden Laschen mit dem zuvor entfernten Splintbolzen arretieren. Die Splintbolzen gegen unbeabsichtigtes Lösen mit dem Federstecker sichern.
4. Das Netzkabel muss mit der am Kabel vorhandenen Zugentlastung an die Lasche der Liegefläche geschraubt werden. Den Netzstecker anschließen. Den Hubmotor an den Liegeflächenmotor anschließen.
5. Die Seitenblenden mit den beiliegenden Schrauben an die Längszargen montieren.

Weiterer Montageverlauf wie im Kapitel 5.7 beschrieben.



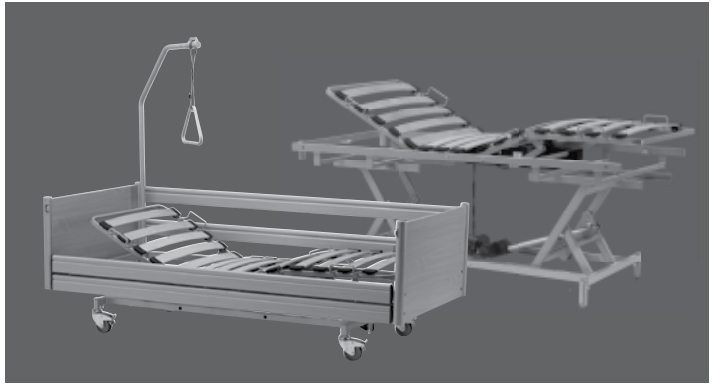

5.5 combiflex / combiflex.fc

Das combiflex wurde speziell für die Anforderungen der Pflege im häuslichen Bereich und in Reha- und Pflegeeinrichtungen konzipiert. Sie bieten den gebrechlichen Menschen, pflegebedürftigen Kranken und Menschen mit Behinderung die Möglichkeit in ihrer gewohnten Umgebung eine optimale Pflege zu unterstützen.

- > combiflex ist nicht für den Krankenhaus-Einsatz geeignet.
- > Sofern das combiflex nicht mit Stellfüßen ausgestattet ist, ist das Pflegebett für den Transport von Patienten geeignet. Das Pflegebett ist während der Lagerung des Patienten fahrbar. Zur Vorbereitung dazu die Rollen feststellen, die Liegefläche in die unterste waagerechte Position verfahren. Die Rollen lösen und das Bett verschieben. Nach dem Transport die Rollen feststellen.
- > combiflex ist für pflegebedürftige Personen ab zwölf Jahren mit einer Körpergröße ab 150 cm geeignet.
- > combiflex kann unter Umständen (bei Bedarf) zu medizinischen Zwecken mit weiteren elektrischen medizinischen Geräten (z.B. Absauggeräte, Ultraschallvernebler, Ernährungssysteme, Antidekubitussysteme, Sauerstoffkonzentratoren usw.) betrieben werden. In diesem Fall müssen alle Bettfunktionen für die Dauer der Anwendung über die integrierte Sperreinrichtung deaktiviert werden.

Achtung: Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen Potenzialausgleich. Medizinische elektrische Geräte, die intravaskular oder interkardial mit dem Patienten verbunden sind, dürfen nicht verwendet werden. Der Betreiber der Medizinprodukte trägt die Verantwortung, dass die Kombination der Geräte die Anforderungen der EN 60601-1:2006 erfüllt.

Besondere Merkmale

Das combiflex bietet bewährte und moderne Technik mit automatischer Vollfunktion zur 4fachen Verstellung der Liegefläche für den häuslichen Einsatz. Nach Bedarf kann jede mögliche automatische Liegeflächenverstellung bis hin zur Sitzposition individuell eingestellt werden.

Das combiflex Bett-im-Bett-System lässt sich durch seine extrem niedrige Einbauhöhe fast mit jedem vorhandenen Bett-rahmen kombinieren und bietet so Individualität an jedem Einsatzort.

Das combiflex Pflegebett ist mit einer erweiterten Funktion der Handschaltung zur Unterstützung der Trendelenburgschen Lagerung erhältlich.

Das combiflex wird betriebsbereit

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sind alle Verpackungsreste vollständig zu entfernen.

1. Die Bindevorrichtungen an der Transportverpackung lösen.
2. Die beiden Teile des Untergestells frei hinstellen (Abb. 1).
3. Die beiden Hälften des Untergestells ineinander stecken aber nicht komplett zusammenschieben (Abb. 2)

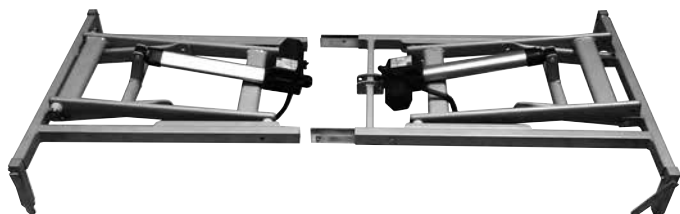


Abb. 1

4. Hubmotor einhängen, Bolzen einschieben und mit Sicherungssplint absichern (Abb. 3 und 4)
5. Die Hälften des Untergestells komplett zusammenschieben und miteinander fest verschrauben (Abb. 5)
6. Die beiden Hälften der Liegefläche zusammenstecken und mit beiliegenden Schrauben festschrauben.



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



7. Hängen Sie den Kastenmotor an die Hebeteile der Liegefläche ein. Mit den Verschußschiebern an beiden Seiten wird der Kastenmotor fixiert (Abb. 7). Achten Sie darauf, die Verschußschieber bis zum Anschlag einzuschieben.

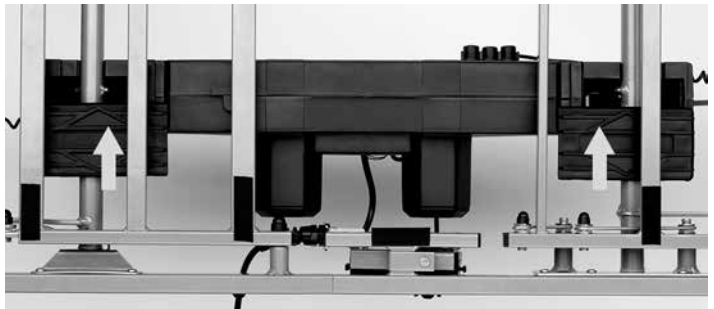


Abb. 7

8. Die Liegefläche nehmen und mit dem Untergestell so verbinden, dass die Kugellager im oberen Bereich des Untergestells passgenau in das U-Profil an der Unterseite der Liegefläche eingeführt werden können (Abb. 8).

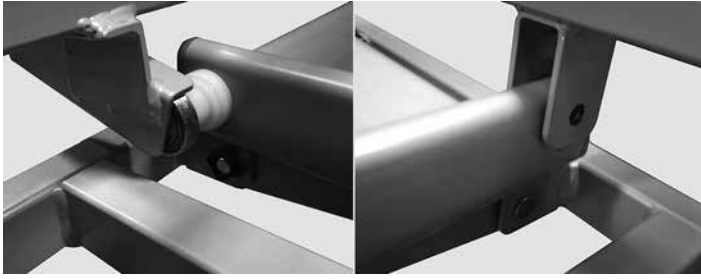


Abb. 8



Abb. 9

9. Anschließend mit den mitgelieferten Bolzen befestigen und mit dem Sicherungsblech absichern (Abb. 9)
10. Das Netzkabel muss mit der am Kabel vorhandenen Zugentlastung an die Lasche der Liegefläche geschraubt werden (Abb. 10).
11. Die Stecker am Kabelende der Hubmotoren des Unterge-
stells in die passenden Buchsen am Kastenmotor einste-
cken.
12. Nach dem Aufbau bzw. vor Inbetriebnahme des Bettes
den Verstellbereich der Liegefläche über die Steuerung
abfahren, um die optimale Positionierung der Kabel zu
prüfen. Der Verstellbereich muss ohne Hindernisse pas-
sierbar sein. Das Netzkabel muss dabei außerhalb des
Bettes verlaufen und die Handschaltung freiliegen.

Weiterer Montageverlauf wie im Kapitel 5.7 beschrieben.

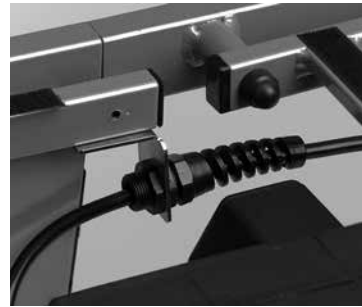


Abb. 10

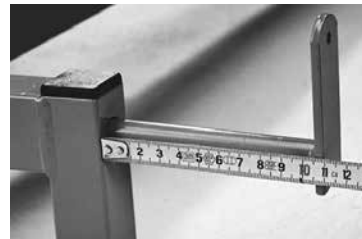



Abb. 11



Abb. 12

* Bock-Top-Tipp

Bettenmodelle mit Rollenverkleidung sind nicht für den Transport des Patienten geeignet. Die Betten sind lediglich dafür bestimmt, innerhalb des Patientenzimmers, zur Reinigung oder für den Zugang zum Patienten bewegt zu werden.

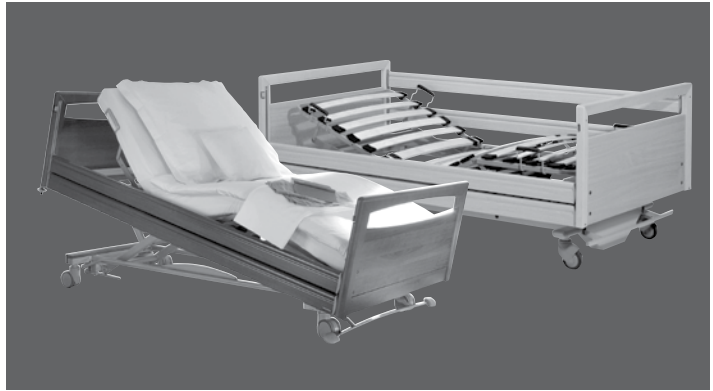

5.6 practico / practico 25/80 / practico comfort / practico economic

practico, practico 25/80, practico comfort und practico economic wurden speziell für die Anforderungen des täglichen Dauereinsatzes in der stationären und häuslichen Pflege konzipiert. Sie bieten den gebrechlichen Menschen, pflegebedürftigen Kranken und Menschen mit Behinderung komfortable Bedingungen und unterstützen die optimale Pflege.

- > practico, practico 25/80, practico comfort und practico economic sind nicht für den Krankenhaus-Einsatz geeignet.
- > Sofern die practico-Modelle mit offenen Rollen ausgestattet sind, sind die Pflegebetten für den Transport von Patienten geeignet. Die Betten sind während der Lagerung des Patienten fahrbar. Zur Vorbereitung dazu die Rollen feststellen, die Liegefläche in die unterste waagerechte Position verfahren. Die Rollen lösen und das Bett verschieben. Nach dem Transport die Rollen feststellen. Ist das Pflegebett mit einer Rollenverkleidung ausgestattet, ist das Bett lediglich dafür bestimmt, innerhalb des Patientenzimmers zur Reinigung oder für den Zugang zum Patienten bewegt zu werden.
- > practico, practico 25/80, practico comfort und practico economic sind für pflegebedürftige Personen ab zwölf Jahren mit einer Körpergröße ab 150 cm geeignet.

- > practico, practico 25/80, practico comfort und practico economic können unter Umständen (bei Bedarf) zu medizinischen Zwecken mit weiteren elektrischen medizinischen Geräten (z.B. Absauggeräte, Ultraschallvernebler, Ernährungssysteme, Antidekubitussysteme, Sauerstoffkonzentratoren usw.) betrieben werden. In diesem Fall müssen alle Bettfunktionen für die Dauer der Anwendung über die integrierte Sperreinrichtung deaktiviert werden.

Achtung: Die Betten haben keine speziellen Anschlussmöglichkeiten für einen Potenzialausgleich. Medizinische elektrische Geräte, die intravaskular oder interkardial mit dem Patienten verbunden sind, dürfen nicht verwendet werden. Der Betreiber der Medizinprodukte trägt die Verantwortung, dass die Kombination der Geräte die Anforderungen der EN 60601-1:2006 erfüllt.

> Bock-Top-Tipp

Bock unterstützt Sie mit einer Wartungsanleitung als vorgefertigte Checkliste gemäß DIN EN 62353 (in der Montageanleitung als Anhang enthalten) bei Ihren notwendigen sicherheitstechnischen Kontrollen. Das spart Zeit und gibt Ihnen die nötige Gewissheit für eine gründliche Durchführung.

Besondere Merkmale

Die ausgereifte Hubtechnik unterhalb der Liegefläche verleiht diesen Betten ihre elegante Silhouette. Dahinter verbirgt sich die ganze Bandbreite technischen Komforts. Nach Bedarf kann jede mögliche automatische Liegeflächenverstellung bis hin zur Sitzkomfortposition individuell eingestellt werden.

Das Modell mit Zentralverriegelung der Bremsen ist auch ohne Vollverkleidung der Lenkrollen erhältlich. Die Objektbetten der practico-Serie sind sowohl mit geteilten als auch mit durchgängigen Seitengittern und verschiedenen Holzendstücken für Kopf- und Fußteil erhältlich.

Die Liegefläche von practico ist mit einer 4-geteilten Liegefläche erhältlich. Die elektrische Verstellung von Rücken- und Beinteil erfolgt mit automatischer 3fach-Funktion.

Das Gesundheitsbett practico ist optional mit einer Trendelenburgschen Lagerung oder einer Komfortsitzposition ausgestattet.

Montage des Bettes

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sind alle Verpackungsreste vollständig zu entfernen.

1. Die Bindevorrichtungen an der Transportverpackung lösen.
2. Das Untergestell mit festgestellten Rollen frei hinstellen und hochfahren.
3. Die vormontierte Liegefläche mit Kastenmotor nehmen und mit dem freistehenden Untergestell so verbinden, dass die Kugellager im oberen Bereich des Untergestells passgenau in das dafür vorgesehene U-Profil am unteren Ende der Liegefläche eingeführt werden können. Anschließend mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.

4. Das Netzkabel muss mit der am Kabel vorhandenen Zugentlastung an die Lasche der Liegefläche geschraubt werden.
 5. Den Netzstecker anschließen. Den Stecker am Kabelende des Hubmotors in die passende Buchse des Kastenmotors einstecken und die Liegefläche hochfahren.
 6. Die Seitenblenden mit den beiliegenden Schrauben an die Längszargen montieren (gilt nicht für practico economic)
- Weiterer Montageverlauf wie im Kapitel 5.7 beschrieben.


5.7 Montage der Seitengitter

Montage der durchgehenden Seitengitter

Ein Endstück auf der Kopfseite komplett aufschieben und fest verschrauben. Das zweite Endstück nur bis direkt vor die Bohrung aufschieben.



Dann die Seitengitter in die vormontierten Metallführungen einhängen und vermitteln. BEACHTEN Sie unbedingt die Beschriftung oben und unten an den Endkappen der Seitengitter, da diese nicht verwechselt werden dürfen.

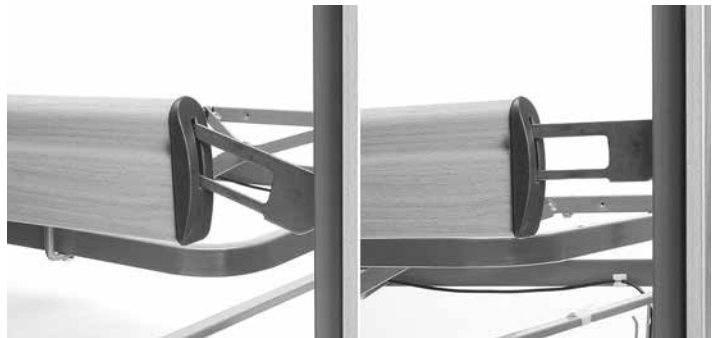


Seitengitter einhängen

Das zweite Endstück komplett einschieben und fest verschrauben.

Montage der einsteckbaren geteilten Seitengitter

Beide Endstücke komplett aufschieben und fest verschrauben.

Geteiltes Seitengitter nehmen und seitlich komplett in die dafür vorgesehene Führung des Liegeflächenrahmens einschieben und mit der mitgelieferten Schrauben festschrauben. Hierbei darauf achten, dass die Seitengitter an der richtigen Stelle montiert werden. Die anderen Seitengitter auf gleiche Weise nacheinander montieren.

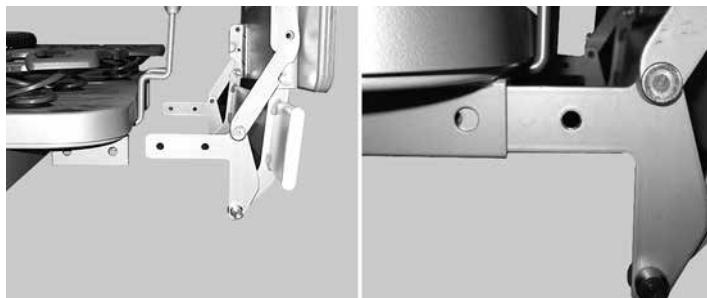

Montage der aufgesteckten geteilten Seitengitter

Beide Endstücke komplett aufschieben und fest verschrauben.

Geteiltes Seitengitter nehmen und von oben mit den Halterungen auf den Liegeflächenrahmen aufschieben. Anschließend mit den mitgelieferten Schrauben am Liegeflächenrahmen fixieren. Senken Sie das Seitengitter ab, um die Schrauben besser erreichen zu können.



Montage der teleskopierbaren geteilten Seitengitter

Bei dieser Seitengittervariante dürfen beide Endstücke nicht vollständig montiert sein. Beide Endstücke nur locker aufstecken und nicht verschrauben.

Die Seitenblenden nehmen und an allen Seiten des Liegeflächenrahmens in den Befestigungslöchern verschrauben. (Abb. 1).

Das U-Profil der teleskopierbaren Mittelpfosten auf den Rahmen der Liegefläche austecken. Die Löcher des U-Profils und des Liegeflächenrahmens müssen dabei übereinander liegen. Die mitgelieferten Schrauben von oben in das Bohrloch stecken und fest verschrauben (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Seitengitterholme nehmen und auf jeder Seite in die vormontierten Metallführungen einhängen und vermitteln. Bitte unbedingt auf die Kennzeichnungen oben und unten an den Seitengitterholmen achten.

Abschließend Endstücke komplett aufschieben und fest verschrauben. Die Seitengitter sind jetzt bereit für die Verwendung (Abb. 3).

Nach dem Aufbau bzw. vor Inbetriebnahme des Bettes den Verstellbereich der Liegefläche über die Steuerung abfahren, um die optimale Positionierung der Kabel zu prüfen. Der Verstellbereich muss ohne Hindernisse passierbar sein.

Das Netzkabel muss dabei außerhalb des Bettes verlaufen und die Handschaltung frei liegen.

Ihr Pflegebett ist nun betriebsbereit!


5.8 Steuerung

Die elektrischen Verstellfunktionen erfolgen über den Handschalter. Folgende Funktionen können mit dem Drücken der entsprechend belegten Taste des Handschalters gesteuert werden:



- | | |
|---------------|------------------------------|
| Bedienknopf 1 | Rückenteil nach oben |
| Bedienknopf 2 | Rückenteil nach unten |
| Bedienknopf 3 | Unterschenkelteil nach oben |
| Bedienknopf 4 | Unterschenkelteil nach unten |
| Bedienknopf 5 | Liegefläche nach oben |
| Bedienknopf 6 | Liegefläche nach unten |

Der Handschalter verfügt darüber hinaus über eine integrierte Sperreinrichtung, die mittels des dazugehörigen Schlüssels aktiviert und deaktiviert werden kann. Zur Sperrung der kompletten elektrischen Funktion den Schlüssel in das rückseitig befindliche Sperrschloss stecken und mit einer entsprechenden Drehung des Schlüssels die Sperrfunktion ein- oder ausschalten.

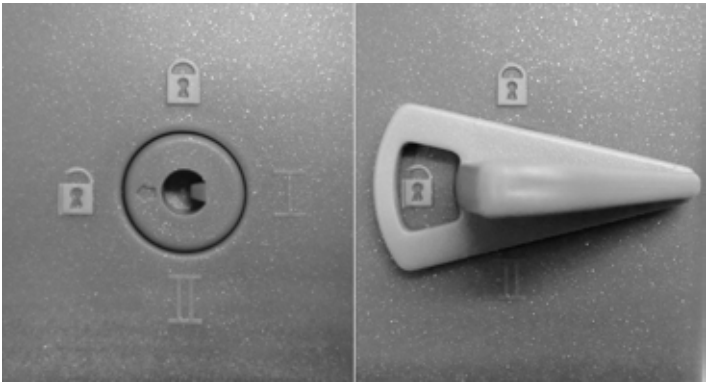

Schlüssel für die Sperreinrichtung

- | | |
|------------------------|---|
| Schalterstellung 1 | Handschalterfunktionen ausführbar |
| Schalterstellung 2 & 4 | Handschalterfunktionen deaktiviert |
| Schalterstellung 3 | Handschaltertasten 1 – 8 aktiviert,
Tasten 9 und 10: Kopftiefelagerung aktiv |

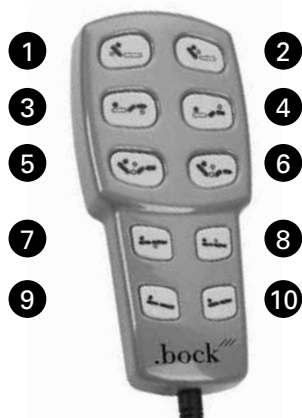


Abb. 1: Handschalter mit Trendelenburg-Funktion

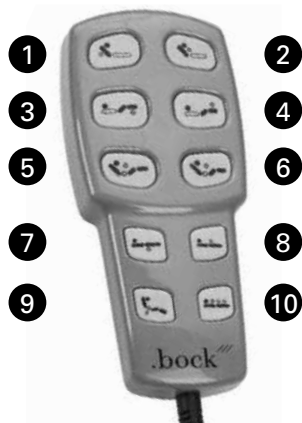


Abb. 2: Handschalter mit Komfort-Sitzposition

Handschalter mit Sonderfunktionen

Über den ergonomisch geformten Handschalter sind die Basisfunktionen per Fingerdruck auf die extra großen, sicher zu bedienenden Bedientasten steuerbar. Die einzelnen Bedientasten sind mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Die Stellmotoren laufen so lange, wie eine entsprechende Taste gedrückt gehalten wird. Ein gewendeltetes Kabel bietet den nötigen Bewegungsfreiraum bei der Bedienung.

Handschalter practico mit Trendelenburg-Funktion (Abb. 1)

Bedienknopf 1	Rückenteil nach oben
Bedienknopf 2	Rückenteil nach unten
Bedienknopf 3	Unterschenkelteil nach oben
Bedienknopf 4	Unterschenkelteil nach unten
Bedienknopf 5	Autokontur nach oben
Bedienknopf 6	Autokontur nach unten
Bedienknopf 7	Liegefläche nach oben
Bedienknopf 8	Liegefläche nach unten
Bedienknopf 9	Anti-Trendelenburg
Bedienknopf 10	Trendelenburg

Handschalter practico mit Komfort-Sitzposition (Abb. 2)

Bedienknopf 1	Rückenteil nach oben
Bedienknopf 2	Rückenteil nach unten
Bedienknopf 3	Unterschenkelteil nach oben
Bedienknopf 4	Unterschenkelteil nach unten
Bedienknopf 5	Autokontur nach oben
Bedienknopf 6	Autokontur nach unten
Bedienknopf 7	Liegefläche nach oben
Bedienknopf 8	Liegefläche nach unten
Bedienknopf 9	Komfort-Sitzposition nach oben
Bedienknopf 10	Komfort-Sitzposition nach unten

Sondereinstellungen können durch Austausch des Handschalters ohne weitere Bauteile umgerüstet werden. Die Handschalter sind innerhalb der beiden Motorenmarken NICHT kompatibel.

ACHTUNG: Kopftieflagerung (Trendelenburg) nur durch autorisiertes Fachpersonal zugelassen.

Handschalter für practico mit ICS-Antrieb und Kopftief- lagerung (Abb. 3)

Taste 1	Rückenteil nach oben
Taste 2	Rückenteil nach unten
Taste 3	Beinteil nach oben
Taste 4	Beinteil nach unten
Taste 5	Autokontur nach oben
Taste 6	Autokontur nach unten
Taste 7	Liegefläche nach oben
Taste 8	Liegefläche nach unten
Taste 9	Komfortsitzposition nach oben*
Taste 10	Kopftief Lagerung
Taste 11	Unterbettbeleuchtung an/aus

Tasten 5 und 6 gleichzeitig gedrückt halten: Reset-Funktion

** Anmerkung: Die Komfortsitzposition fährt mit der Taste 9 nur nach oben. Alle verstellten Positionen müssen separat abgesenkt werden.*

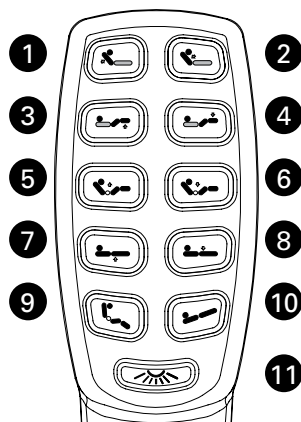


Abb. 3: Handschalter für Betten mit ICS-Antrieb

Handschalter für practico mit ICS-Antrieb und Niedrigfunktion (Abb. 4)

Taste 1	Rückenteil nach oben
Taste 2	Rückenteil nach unten
Taste 3	Beinteil nach oben
Taste 4	Beinteil nach unten
Taste 5	Autokontur nach oben
Taste 6	Autokontur nach unten
Taste 7	Liegefläche nach oben
Taste 8	Liegefläche nach unten
Taste 9	Komfortsitzposition nach oben*
Taste 10	Freigabe Niedrigfunktion
Taste 11	Unterbettbeleuchtung an/aus

Tasten 5 und 6 gleichzeitig gedrückt halten: Reset-Funktion

** Anmerkung: Die Komfortsitzposition fährt mit der Taste 9 nur nach oben. Alle verstellten Positionen müssen separat abgesenkt werden.*

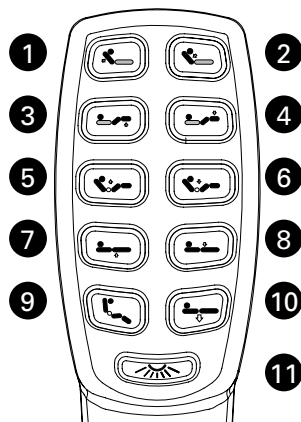


Abb. 4: Handschalter für Niedrigbetten mit ICS-Antrieb

Die Handschalter verfügen über eine integrierte Sperreinrichtung, die mittels des dazugehörigen Schlüssels aktiviert und deaktiviert werden kann. Zur Sperrung der elektrischen Funktionen den Schlüssel in das rückseitig befindliche Sperrschloss stecken und mit einer entsprechenden Drehung des Schlüssels die Sperrfunktion ein- oder ausschalten.

*** Bock-Gefahren-Hinweis**

Die Motoren erfüllen den Spritzwasserschutz IPX4. Die Kabel dürfen nicht gequetscht werden. Die Verstellung der beweglichen Teile ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu nutzen. Die Hermann Bock GmbH übernimmt keine Haftung für nicht genehmigte technische Veränderungen.

5.9 Standortwechsel

Soll das Bett an einen anderen Standort verfahren werden, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- Die Liegefläche in die tiefste Position bringen.
- Vor dem Verfahren den Netzstecker ziehen und mit der Aufhängevorrichtung am Holzseitengitter befestigen, um so das Netzkabel gegen Herabfallen und Überfahren zu sichern. Es ist darauf zu achten, dass das Kabel nicht über den Boden schleift.
- Die Steckvorrichtung vom 9-Volt-Batterie-Block abziehen. Bei Wiederinbetriebnahme des Bettes den Stecker am IlcoFlexx 581 erneut befestigen.
- Vor dem Wiedereinstecken des Netzsteckers das Netzkabel visuell auf mechanische Beschädigungen überprüfen (Knick- und Druckstellen, Abschürfungen und blanke Drähte).
- Das Netzkabel so legen, dass es beim Betrieb des Bettes nicht gezerrt, überfahren oder durch bewegliche Teile des Bettes gefährdet werden kann und den Netzstecker wieder einstecken.

5.10 Transport- Lagerungs- und Betriebsbedingungen

	Transport und Lagerung	Betrieb
Temperatur	0°C bis +40°C	10°C bis 40°C
Relative Luftfeuchte	20% bis 80%	20% bis 70%
Lufdruck	800hPa bis 1060hPa	

5.11 Funktionshinweise

Um das Bett an einem Standort zu fixieren, müssen die Bremsen an den Laufrollen des Untergestells blockiert werden. Dazu muss der Feststellhebel am Untergestell (Abb. 1) mit dem Fuß nach unten bewegt werden.

Die integrierten Seitengitter müssen bei Bedarf so weit hochgezogen werden, dass sie einrasten (siehe Kapitel 3). Das Absenken der Seitengitter geschieht so, wie in Kapitel 3.2 beschrieben.

Beim Einsatz unterschiedlicher Matratzenstärken darf die Mindesthöhe von 22 cm, gemessen von der oberen Kante des Seitengitters über der Matratze, ohne Kompression nicht unterschritten werden (darüber hinaus ist ein drittes Aufsteckgitter zu benutzen).

5.12 Entsorgung

Die einzelnen Materialkomponenten aus Kunststoff, Metall und Holz sind recyclingfähig und können der Wiederverwertung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zugeführt werden. Bitte beachten Sie, dass elektrisch verstellbare Pflegebetten gemäß der WEEE-EG Richtlinie 2002/96/EG als gewerblich genutzter Elektroschrott (b2b) zu betrachten sind. Alle ausgetauschten elektrischen und elektronischen Komponenten des elektrischen Verstellsystems sind gemäß der Anforderungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (kurz ElektroG) zu behandeln und fachgerecht zu entsorgen.

* Bock-Gefahren-Hinweis

Versuchen Sie in keinem Fall Störungen an der elektrischen Ausrüstung selbst zu beheben, unter Umständen besteht Lebensgefahr! Beauftragen Sie entweder den Kundendienst von Hermann Bock GmbH oder autorisiertes Elektrofachpersonal, das die Störungsbehebung unter Einhaltung aller maßgeblichen VDEVorschriften und Sicherheitsbestimmungen durchführt.

Vor jedem Wiedereinsatz ist das Bett zu reinigen und zu desinfizieren. Gleichfalls muss eine Sichtkontrolle zur Prüfung eventueller mechanischer Beschädigungen durchgeführt werden. Genaue Angaben dazu finden Sie im Sicherheitsleitfaden „Garantiert Bock“ auf den Seiten 26 bis 30 – Checklisten.

5.13 Störungsabhilfe

Diese Übersicht gibt Ihnen Hinweise darauf, welche Funktionsstörungen Sie selbst prüfen und einfach beheben können und welche Störungen auf jeden Fall in die Hände von Fachleuten gehören.


Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Keine Funktion der Antriebe über die Handschaltung	Netzkabel nicht eingesteckt	Netzkabel einstecken
	Steckdose ohne Spannung	Steckdose bzw. Sicherungskasten prüfen
	Stecker der Handschaltung sitzt nicht richtig fest	Steckverbindung am Motor prüfen
	Handschaltung oder Antrieb defekt	Informieren Sie den Betreiber oder den Kundendienst der Fa. H. Bock GmbH
	Netzfreeschaltung nicht aktiviert	Netzfreeschaltung durch drücken der grünen Taste aktivieren, zusätzlich die 9V-Batterie überprüfen
	Sperreinrichtung oder Sperrbox im Handschalter aktiviert	Sperreinrichtung oder Sperrbox im Handschalter deaktivieren
Antriebe stoppen bei Tastendruck nach kurzer Anlaufzeit	Ein Hindernis befindet sich im Verstellbereich	Hindernis entfernen
	Die sichere Arbeitslast ist überschritten	Belastung reduzieren
Antriebe stoppen nach längerer Verstellzeit	Verstellzeit oder sichere Arbeitslast überschritten und Polyswitch im Transformator des Steuergerätes hat auf erhöhte Erwärmung reagiert	Das Antriebssystem ausreichend abkühlen lassen, mind. eine Minute Wartezeit einhalten
Entgegengesetzte Funktionen bei Bedienung der Handschaltung	Motorstecker intern vertauscht	Informieren Sie den Betreiber oder den Kundendienst der Fa. H. Bock GmbH
Einzelne Antriebe laufen nur in eine Richtung	Handschalter, Antrieb oder Steuergerät defekt	Informieren Sie den Betreiber oder den Kundendienst der Fa. H. Bock GmbH
Antriebe stoppen und Bett verbleibt in Schräglage	Ständige Bedienung der Verstellfunktionen	Liegefläche in unterste Position fahren und dadurch wieder horizontal ausrichten. Sperreinrichtung im Handschalter aktivieren

* Bock-Gefahren-Hinweis

Verwenden Sie zur erweiterten Ausstattung Ihres Gesundheitsbettes ausschließlich Original-Zubehör von Hermann Bock, das für das jeweilige Bettmodell freigegeben ist. Eine genaue Übersicht des Zubehörs und der Extras für Ihr Bett befindet sich auf dem separaten Datenblatt. Hermann Bock übernimmt keine Haftung für Unfälle, Schäden und Gefährdungen, die durch die Verwendung anderer Zubehörteile entstehen!

> Bock-Top-Tipp

Die Montage der Bettverlängerungen übernimmt natürlich auch das Service-Team von Hermann Bock. Hermann Bock empfiehlt grundsätzlich die Ausrüstung mit Matratzen und Bezügen gemäß DIN EN 597 aus schwer entflammbarem Material.

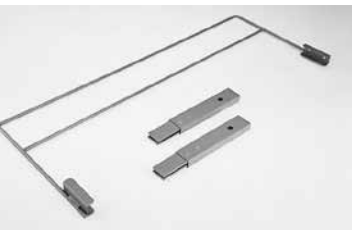

6. Zubehör

Um jedes Gesundheitsbett noch genauer auf die individuellen Bedürfnisse der pflegebedürftigen Person abzustimmen, bietet die Hermann Bock GmbH praktisches und mobilitätsförderndes Zubehör an. Die Montage erfolgt schnell und problemlos an den dafür bereits vorgesehenen Fixierpunkten des Bettes. Selbstverständlich entspricht jedes Element für die zusätzliche Ausrüstung dem besonderen Qualitäts- und Sicherheitsstandard von Bock. Neben dem Standard-Zubehör als Grundausrüstung für jedes Bett besteht ein umfangreiches Angebot an Extra-Zubehör. Diese Extras variieren je nach Bettmodell und sind seinen Spezialfunktionen und dem Einsatzort angepasst. Die Bandbreite reicht hier von technischen Elementen über Matratzen bis zum Beistellbett. Eine große Auswahl von Holzdekoren und Farbvarianten geben Entscheidungsspielraum und ermöglichen die harmonische Integration jedes Gesundheitsbettes in vorhandenes Mobiliar.

6.1 Sondermaße

Sondermaße gehören bei der Hermann Bock GmbH zum festen Bestandteil der Fertigung.

Optimaler Liegekomfort für Pflegepersonen mit besonderem Körperbau kann nur durch Spezialanfertigungen realisiert werden. Die Hermann Bock GmbH bietet mit ihren Sondermaßenfertigungen die Möglichkeit, jedes Gesundheitsbett individuell auf die körperlichen Voraussetzungen der Pflegeperson anzupassen. Ab einer Körpergröße von 190 cm empfiehlt die Hermann Bock GmbH den Einsatz einer Bettverlängerung, mit der die Liegefläche bis auf 220 cm verlängert werden kann. So wird auch großen Personen ein hoher Liegekomfort bei gleich bleibender Funktionalität ermöglicht.

6.2 Montage – Bettverlängerungen (Therapiebetten)

Zum Lieferumfang einer Liegeflächenverlängerung gehören folgende Teile:

- 2 Adapterstücke für linkes und rechtes Fußteil
- 1 Drahtbügel für das Fußteil
- 1 Satz Seitengitter
- Befestigungsschrauben

Die einfache Montage nehmen Sie so vor:

1. Matratze von der Liegefläche nehmen.
2. Fußendstück entfernen.
3. Adapterstücke am Fußende in den Liegeflächenrahmen stecken und verschrauben.
4. Drahtbügel auf das Fußteil stecken, Löcher bohren ($d = 4,2 \text{ mm}$) und verschrauben.
5. Das Fußendstück zunächst nur bündig mit der Gewindebohrung zum Liegeflächenrahmen aufschieben.
6. BEACHTEN Sie unbedingt die Beschriftung oben und unten an den Seitengittern, da diese nicht verwechselt werden dürfen.
7. Dann die Seitengitter in die vormontierten Metallführungen einhängen und vermitteln.
8. Das Endstück bis zum Gewindeloch aufschieben und fest verschrauben.

Montage – Bettverlängerungen (Objektbetten)

Zum Lieferumfang einer Liegeflächenverlängerung gehören folgende Teile:

- 1 Verschlüsselement für die Liegefläche inkl. Seitenblendenverlängerung
- 1 Satz längere Seitengitter

Montage:

1. Matratze von der Liegefläche nehmen
2. Verschraubung des Fußendstücks lösen und Verlängerung ausziehen, dabei die Seitengitter entnehmen
3. Verschlüsselement für Liegefläche inkl. Blenden einlegen und verschrauben
4. Seitengitter einbauen
3. Fußendstück bündig vor die Seitenblenden schieben und verschrauben

Bei practico comfort (Ausführung mit Flügelgitter):

- 1 Verschlüsselement für die Liegefläche (längerer Auszug um 270mm)



Abb. 1



Fertig montierte Bettverlängerung

* Bock-Gefahren-Hinweis

Bei der Benutzung von Zubehörteilen am Bett oder der Benutzung von medizinisch notwendigen Geräten, z. B. Infusionsständern, in unmittelbarer Bettnähe ist besonders darauf zu achten, dass beim Verstellen der Rücken- und Beinlehnen keine Quetsch- oder Scherstellen für die Pflegeperson entstehen.



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

Montage practico comfort (Ausführung mit Flügelgitter):

1. Matratze von der Liegefläche nehmen
2. Verschraubung des Fußendstücks lösen und Verlängerung ausziehen
3. Verschlusselement für Liegefläche einlegen und verschrauben
4. Fußendstück bündig vor das Verschlusselement schieben und verschrauben

6.3 Montage – Zubehör

Folgendes Standard-Zubehör ist mit den Bettmodellen zu kombinieren:

Seitengittererhöhung (Abb. 1)

Lieferumfang: Seitengittererhöhung komplett montiert

- Kunststoffverschluss öffnen, Seitengittererhöhung aufstecken, mittig positionieren und Verschluss schließen. Bitte darauf achten, dass der Auslöseknopf der Seitengittererhöhung nach außen zeigt.

Wichtiger Hinweis:

Die bock-Seitengittererhöhung ist für den Einsatz mit sämtlichen bock Holz-Seitengittervarianten konzipiert. Bei einem Einsatz an Fremdfabrikaten übernimmt die Hermann Bock GmbH keine Gewähr!

Aufrichter mit Triangelgriff, 6,5 kg (Abb. 2)

Die sichere Arbeitslast des Aufrichters beträgt max. 75 kg.

Lieferumfang: 1 Stck. Aufrichter mit Halterungsöse, 1 Stck. Triangel

- Aufrichter in vorgesehene Buchse am Kopfteil stecken und arretieren, Triangel in die Halterungsöse einhängen.
- Der Höhenverstellbereich des Triangelgriffs darf, von der Oberkante der jeweiligen Matratze (Matratzenhöhe 100 mm und 120 mm) bis zur Unterkante des waagrecht verlaufenden Griffes gemessen, den Abstand von ≤ 550 mm bis ≥ 700 mm nicht unterschreiten.

ACHTUNG: Aufrichter nicht außerhalb der Liegefläche schwenken.

Der Triangelgriff hat bei normalem Gebrauch eine Haltbarkeit von mindestens 5 Jahren. Wir verweisen auf die STK-Prüfung.

Seitengitterpolster, 1,4 kg (Abb. 3)

Lieferumfang: 1 Stck. Bezug, 1 Stck. Polster

- Reißverschluss des Bezugs öffnen, Polster von oben auf das Seitengitter aufziehen.
- Schaumstoffpolster von der Innenseite des Bettes aus in den Bezug ziehen, Reißverschluss bzw. Klettband schließen.

Tablett, 4,0 kg (Abb. 4)

Lieferumfang: 1 Stck. Tablett

- Das Tablett wird auf das Seitengitter aufgelegt und ist durch zwei Abstandhalter gegen Verrutschen gesichert.

Universal-Klemme, (0,6 kg)

Lieferumfang: 1 Stck. Klemme, 1Stck. Befestigungsring

Die Universal-Klemme ist eine spezielle Halterung, die eine flexible Positionierung des modularen Funktionszubehörs ermöglicht. Wahlweise können daran Handschalter-Köcher mit Schwanenhals, Urinflaschenhalter, Infusionssysteme oder eine Lampe befestigt werden. Darüber hinaus lässt sich die Universal-Klemme ganz nach Bedarf am Seitengitter verschieben.



Universalklemme mit: Drainagesackhalter, Urinflaschenhalter, Schwanenhals und Handschalter-Köcher (von links nach rechts)

- Die Universal-Klemme wird am oberen Seitengitter angeklemt und mit dem Befestigungsring angebracht.

> Bock-Top-Tipp

Die Service-Hotline von Hermann Bock berät Sie gerne über die für Ihr Bett optimale Nachrüst-Lösung.

Hotline-Nr.: 0180.5262500
(14 cent /min. aus dem Festnetz / bis zu 42 cent/min. aus dem Mobilfunknetz).

Ein umfangreiches Beimöbelprogramm ergänzt die verschiedenen Bettmodelle bis hin zur kompletten Wohnraumgestaltung und verbindet so Pflege- und Wohnkomfort auf ganz besondere Weise.



Abb. 4

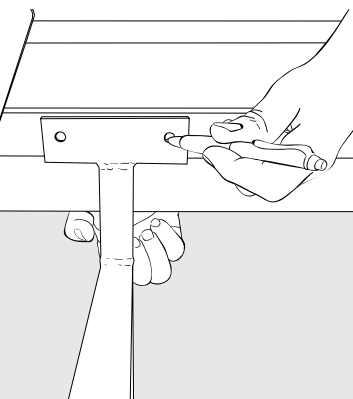


Abb. 1

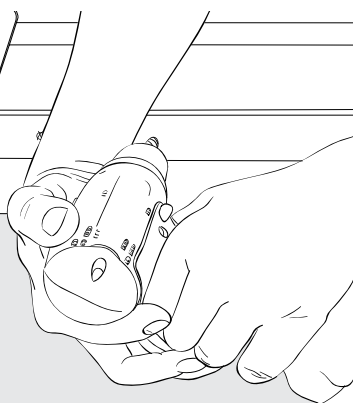


Abb. 2


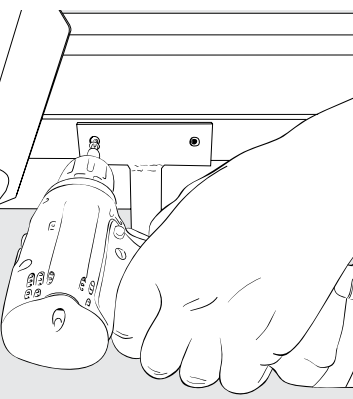


Abb. 3

Aufstehbügel mit Traverse für Stellteilbetten, 3,0 kg

Lieferumfang: 1 Stck. Aufstehbügel mit 1 Stck. Halterungstraverse, 4 Stck. Schrauben 4 mm

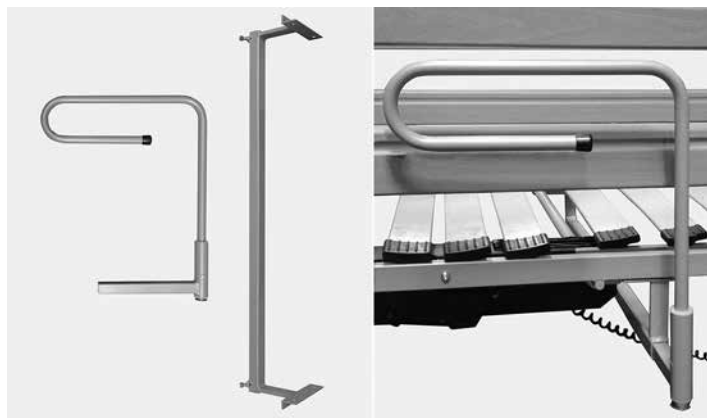

Links: Lieferumfang, rechts: fertig montierter Aufstehbügel

- Die Halterungstraverse von unten an den Liegeflächenrahmen halten und mit einem Stift die Bohrlöcher am Rahmen markieren (Abb. 1).
- An den vorher angezeichneten Stellen Löcher (3,5 mm) in den Liegeflächenrahmen bohren (Abb. 2).
- Die Traverse mit den mitgelieferten Schrauben am Liegeflächenrahmen verschrauben (Abb. 3).
- Aufstehbügel in die Halterungstraverse schieben (Abb. 4), in die gewünschte Position bringen und fest verschrauben (Abb. 5).

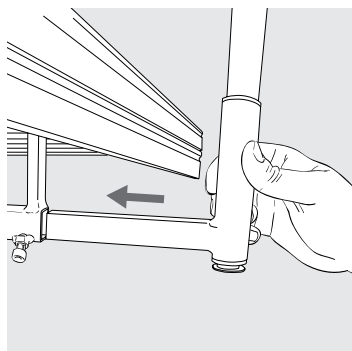


Abb. 4

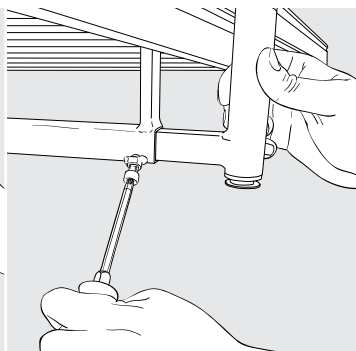


Abb. 5

Aufstehbügel mit Halterung für Scherenbetten, 3,0 kg

Lieferumfang: 1 Stck. Aufstehbügel mit Halterung



- Die vier Schrauben an der Halterung lösen.
- Bleche der Halterung auf die Quertraverse legen und verschrauben.
- Aufstehbügel in die Halterung schieben und in die gewünschte Position bringen und fest verschrauben.

6.4 Matratzen

Grundsätzlich sind für Gesundheitsbetten von Hermann Bock alle Schaumstoff- und Latexmatratzen verwendbar, die mindestens ein Raumgewicht von 35 kg/m^3 bei den Maßen $90 \times 190 \text{ cm}$, $100 \times 190 \text{ cm}$, $90 \times 200 \text{ cm}$ und $100 \times 200 \text{ cm}$ haben.


Die Höhe der verwendeten Matratze darf:

bei Stahl-, Alu-, Federholz- oder Ripoplan-Liegeflächen
15 cm (bei Objektbetten 16 cm) und

bei Liegeflächen mit Federsystemen 12 cm

nicht überschreiten.

Bei höheren Matratzen muss ein zusätzliches Aufsteckgitter verwendet werden, das als Zubehör erhältlich ist. Bei Verwendung von Schaumstoffmatratzen empfehlen wir Ein- bzw. Kerbschnitte zur besseren Anpassung an die Liegefläche.

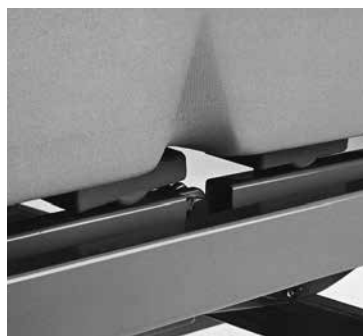

> Bock-Top-Tipp

Kratzer und Lackabsplitterungen, die durch die komplette Lackschicht hindurchgehen, sollten vorbeugend gegen das Eindringen von Feuchtigkeit mit geeigneten Reparaturmitteln versiegelt werden.

7. Reinigung, Pflege und Desinfektion

Die einzelnen Bettelemente bestehen aus erstklassigen Materialien. Die Oberflächen der Stahlrohre sind mit einer dauerhaften Polyester-Pulverbeschichtung überzogen.

Alle Holzteile sind schadstoffarm oberflächenversiegelt. Alle Bettelemente lassen sich entsprechend den geltenden Hygieneanforderungen innerhalb der verschiedenen Einsatzbereiche durch Wisch- und Sprühdesinfektion problemlos reinigen und pflegen. Durch die Beachtung der folgenden Pflegehinweise bleiben die Gebrauchsfähigkeit und der optische Zustand Ihres Gesundheitsbettes lange erhalten.

7.1 Reinigung und Pflege

Stahlrohre und lackierte Metallteile:

Zur Reinigung und Pflege dieser Oberflächen benutzen Sie ein feuchtes Tuch unter Verwendung handelsüblicher, milder Haushaltsreiniger.

Holz-, Dekor- und Kunststoffelemente:

Geeignet sind alle handelsüblichen Möbelpflege- und Reinigungsmittel. Die Reinigung der Kunststoffelemente mittels eines feuchten Tuchs ohne Reinigungsmittelzusätze ist allgemein ausreichend. Zur Pflege der Kunststoffoberflächen sollte ein speziell für Kunststoff geeignetes Produkt verwendet werden.

Antrieb:

Um das Eindringen von Feuchtigkeit auszuschließen, sollte das Motor-Gehäuse nur leicht feucht abgewischt werden.

Auflagesysteme ripolux, ripoplan und ripolux neo:

Zur Reinigung der Träger- und Federelemente sowie der Böden aus Kunststoff benutzen Sie ein leicht feuchtes Tuch ohne Zusatz von Reinigungsmitteln oder als Zusatz ein ausschließlich für Kunststoffe geeignetes Produkt. Bei stärkeren Verschmutzungen entfernen Sie die Federelemente von den Trägerelementen und die Trägerelemente vom Liegeflächenrahmen durch einfaches Ziehen. Die demontierten Kunststoffelemente können zur einfachen Reinigung mit heißem Wasser abgebraust oder abgespritzt werden. Zur Desinfektion können die Einzelteile mit einem für Kunststoffe geeigneten Mittel besprüht werden. Durch leichtes Schütteln perlt der größte Teil der Feuchtigkeit bereits wieder von der Kunststoffoberfläche ab, der Rest trocknet in kürzester Zeit.

Nach der rückstandsfreien Trocknung die Elemente wieder anbringen. Alternativ können die einzelnen Liegeflächenelemente komplett vom Rahmen entfernt und gereinigt werden.

7.2 Desinfektion

Zur Wischdesinfektion des Bettes eignen sich alle Mittel entsprechend der EN 12720. Um die Materialbeständigkeit der Kunststoffelemente wie das Motoren-Gehäuse, Dekorelemente, ripolux und ripoplan zu erhalten, sollten zur Desinfektion nur milde und schonende Mittel zum Einsatz kommen. Konzentrierte Säuren, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, hohe Alkohole, Äther, Ester und Ketone greifen das Material an und sollten daher nicht verwendet werden.

7.3 Gefahren vermeiden

Um Gefahren im Zusammenhang mit der Reinigung und Desinfektion zu vermeiden, beachten Sie vorher unbedingt folgende Vorschriften in Verbindung mit den elektrischen Bauteilen Ihres Gesundheitsbettes. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungsgefahren und erheblichen Schäden der elektrischen Leitungen und des Antriebs kommen.

1. Den Netzstecker ziehen und so positionieren, dass Berührungen mit übermäßig viel Wasser oder Reinigungsmitteln ausgeschlossen sind.
2. Prüfung des vorschriftsmäßigen Sitzes aller Steckverbindungen.
3. Kontrolle der Kabel und elektrischen Bauteile auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen festgestellt werden, keine Reinigung vornehmen, sondern zunächst die Mängel seitens des Betreibers bzw. von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen.
4. Vor Inbetriebnahme den Netzstecker auf Restfeuchtigkeit prüfen und eventuell abtrocknen oder ausblasen.
5. Bei Verdacht darauf, dass Feuchtigkeit in die elektrischen Komponenten eingedrungen ist, sofort den Netzstecker herausziehen bzw. keinesfalls erneut an das Stromnetz anschließen. Das Bett unverzüglich außer Betrieb nehmen, entsprechend sichtbar kennzeichnen und den Betreiber informieren.

* Bock-Gefahren-Hinweis

Zur Reinigung dürfen keinesfalls Scheuermittel bzw. schleifpartikelhaltige Reinigungsmittel oder Putzkissen sowie Edelstahlpflegemittel verwendet werden. Gleichermaßen nicht erlaubt sind organische Lösungsmittel wie halogenierte/aromatische Kohlenwasserstoffe und Ketone sowie säure- und laugenhaltige Reinigungsmittel.

Keinesfalls darf das Bett mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger abgespritzt werden, da Flüssigkeit in die elektrischen Bauteile eindringen und als Folge davon Fehlfunktionen und Gefährdungen eintreten könnten.



> Bock-Top-Tipp

Unser Hotline-Service beantwortet Ihnen freundlich und kompetent Fragen rund um das Thema Sicherheit von Bock-Gesundheitsbetten, zu den Bock-Schulungen und hilft Ihnen mit praktischem Rat, wenn Probleme bei der Handhabung von elektrisch betriebenen Betten auftreten sollten. Unser Hotline-Service steht Ihnen unter der Nummer 01805262500 montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.30 Uhr und freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr Rede und Antwort (14 cent /min. aus dem Festnetz / bis zu 42 cent/min. aus dem Mobilfunknetz).

Dem Betreiber obliegt die Verantwortung im Umgang mit den Sperreinrichtungen, die individuell vom physischen und psychischen Zustand der pflegebedürftigen Person abhängig gemacht werden sollten.

8. Regelmäßige Funktionsprüfung mit Service

Regelmäßige Funktionsprüfungen dienen der Beibehaltung des höchstmöglichen Sicherheitsniveaus und sind damit eine wichtige Schutzvorkehrung. Medizinprodukte müssen entsprechend den vorgegebenen Fristen des Herstellers und den allgemein anerkannten Regeln der Technik regelmäßig sicherheitstechnisch kontrolliert werden. Die sicherheitstechnisch bedingten Schutzmaßnahmen unterliegen in der täglichen Praxis unterschiedlichen Anforderungen und Beanspruchungen, somit auch die möglichen Verschleißerscheinungen. Um Gefahren sicher vorzubeugen, ist die stete und konsequente Einhaltung der Fristen für die regelmäßigen Funktionsprüfungen zwingend notwendig. Der Hersteller hat dabei keinen Einfluss darauf, inwieweit die vorgeschriebenen Regeln vom Betreiber der elektrischen Betten eingehalten werden. Bock vereinfacht Ihnen die Einhaltung der notwendigen Schutzvorkehrungen mit zeitsparenden Service-Leistungen.

Die Durchführung der Prüfung, Bewertung und Dokumentation darf nur durch oder unter Aufsicht sachkundiger Personen, wie Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen durchgeführt werden, die über Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen verfügen und in der Lage sind, mögliche Auswirkungen und Gefahren zu erkennen.

Für den Fall, dass keine Person seitens des Anwenders für die regelmäßige Funktionsprüfungen infrage kommt oder beauftragt wird, bietet Ihnen der Bock-Service die Übernahme der regelmäßigen Funktionsprüfungen bei gleichzeitiger Kontrolle und Einhaltung der entsprechenden Inspektionsintervalle gegen Gebühr an.

Die Hermann Bock GmbH schreibt als Inspektionsintervall vor, mindestens einmal jährlich sowie vor und nach jedem Wiedereinsatz des Bettes eine Funktionsprüfung durchzuführen.

Zur Unterstützung stellt Ihnen die Hermann Bock GmbH für die Durchführung aller notwendigen Sicherheitskontrollen die Checkliste für die regelmäßige Funktionsprüfung in der Montage- und Gebrauchsanleitung zur Verfügung. Bitte kopieren Sie sich die Checkliste als Formular für Ihre Funktionsprüfung. Die Checkliste dient als Nachweisprotokoll der Durchführung und ist sorgfältig aufzubewahren.

Die Checkliste für regelmäßige Funktionsprüfungen ist auch als Download im Internet erhältlich: www.bock.net.

Dieses Pflegebett wurde so entwickelt, konstruiert und gefertigt, dass es über einen langen Zeitraum sicher funktionieren kann. Bei sachgemäßer Bedienung und Anwendung hat dieses Pflegebett eine zu erwartende Lebensdauer von 2 bis 10 Jahren. Die Lebensdauer richtet sich nach Einsatzbedingungen und -häufigkeit. So ist im Einrichtungsbereich eine Lebensdauer von 15 Jahren zu erwarten.

Achtung:

Bei nicht autorisierten technischen Änderungen am Produkt erlöschen alle Garantieansprüche.

> Bock-Top-Tipp

In der Bock-Schulung werden Ihre technischen Mitarbeiter entweder bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Haus für die Durchführung der regelmäßigen Funktionsprüfungen an Bock-Gesundheitsbetten geschult und damit in die Lage versetzt, die Funktionsprüfung ordnungsgemäß durchzuführen.

*** Bock-Gefahren-Hinweis**

Vor jedem Wiedereinsatz ist das Bett zu reinigen und zu desinfizieren. Gleichfalls muss eine Sichtkontrolle zur Prüfung eventueller mechanischer Beschädigungen durchgeführt werden.

Leitlinien und Herstellererklärung

– Elektromagnetische Aussendungen

Das Pflegebett ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Pflegebettes sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

Störaussendungs-Messungen	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Gruppe 1	Das Pflegebett verwendet HF-Energie ausschließlich zu seiner internen Funktion. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering, und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden. Das Pflegebett ist für den Gebrauch in allen Einrichtungen ausschließlich denen im Wohnbereich geeignet und solchen, die unmittelbar an ein öffentliches Versorgungsnetz angeschlossen sind, das auch Gebäude versorgt, die zu Wohnzwecken benutzt werden.
HF-Aussendungen nach CISPR 11	Klasse B	
Aussendungen von Oberschwingungen nach IEC 61000-3-2	Klasse A	
Aussendungen von Spannungsschwankungen/Flicker nach IEC 61000-3-3	Stimmt überein	

– Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Pflegebett ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Pflegebettes sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeitsprüfungen	IEC 60601 Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Umgebung -Leitlinien
Entladung statischer Elektrizität (ESD) nach IEC 61000-4-2	± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftentladung	± 6 kV Kontaktentladung ± 8 kV Luftentladung	Flurböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luftfeuchte mindestens 30% betragen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Bursts nach IEC 61000-4-4	± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen	± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Stoßspannungen (Surges) nach IEC 61000-4-5	± 1 kV Gegentaktspannung ± 2 kV Gleichtaktspannung	± 1 kV Gegentaktspannung ± 2 kV Gleichtaktspannung	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung nach IEC 61000-4-11	< 5 % U_T (>95 % Einbruch der U_T) für ½ Periode 40 % U_T (60 % Einbruch der U_T) für 5 Perioden 70 % U_T (30 % Einbruch der U_T) für 25 Perioden < 5 % U_T (>95 % Einbruch der U_T) für 5 Sekunden	< 5 % U_T (>95 % Einbruch der U_T) für ½ Periode 40 % U_T (60 % Einbruch der U_T) für 5 Perioden 70 % U_T (30 % Einbruch der U_T) für 25 Perioden < 5 % U_T (>95 % Einbruch der U_T) für 5 Sekunden	Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Anwender des Pflegebettes fortgesetzte Funktion auch beim Auftreten von Unterbrechungen der Energieversorgung fordert, wird empfohlen, das Pflegebett aus einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie zu speisen.
Magnetfeld bei der Versorgungs-frequenz (50/60 Hz) nach IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen Werten, wie sie in der Geschäfts- oder Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.

ANMERKUNG: U_T ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Prüfpegel.

– Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Pflegebett ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des Pflegebettes sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeitsprüfungen	IEC 60601 Prüfpegel	Übereinstimmungspegel	Elektromagnetische Umgebung -Leitlinien
Geleitete HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-6 Gestrahlte HF-Störgrößen nach IEC 61000-4-3	3 V 150kHz-80MHz 3 V/m 80MHz-2500MHz	3 V 150kHz-80MHz 3 V/m 80MHz-2500MHz	Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zum Pflegebett einschließlich der Leitungen verwendet werden als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet wird. Empfohlener Schutzabstand: $d = \left[\frac{3,5}{3} \right] \sqrt{P}$ für 150 kHz bis 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{3} \right] \sqrt{P}$ für 80 MHz bis 800 MHz $d = \left[\frac{7}{3} \right] \sqrt{P}$ für 800 MHz bis 2,5 GHz Mit P als der Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angaben des Herstellerstellers und d als empfohlenem Schutzabstand in Metern (m). Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäß einer Untersuchung vor Ort^a geringer als der Übereinstimmungspegel sein.^b In der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen möglich. 

ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2 Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorptionen und Reflexionen von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

^a Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender können theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Untersuchung des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem Das Pflegebett benutzt wird, die obigen Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte Das Pflegebett überwacht werden, um die bestimmungsgemäße Funktion nachzuweisen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort des Pflegebettes.

^b Über dem Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke geringer als 3 V/m sein.

Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem Pflegebett

Das Pflegebett ist für den Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der gestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden. Der Kunde oder der Anwender des Pflegebettes kann helfen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten (Sendern) und dem Pflegebett – abhängig von der Nennleistung des Kommunikationsgerätes, wie unten angegeben – einhält.

Nennleistung des Senders W	Schutzabstand abhängig von der Sendefrequenz m		
	150 kHz bis 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{3} \right] \sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{3} \right] \sqrt{P}$	800 MHz bis 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{3} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Für Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene Schutzabstand d in Metern (m) unter Verwendung der Gleichung ermittelt werden, die der Frequenz des Senders entspricht, wobei P die maximale Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angabe des Herstellerstellers ist.

ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Schutzabstand für den höheren Frequenzbereich.

ANMERKUNG 2 Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorptionen und Reflexionen von Gebäuden, Gegenständen und Menschen beeinflusst.

Konformitätserklärung

Hersteller:

Hermann Bock GmbH

Nickelstraße 12

33415 Verl

Klassifizierung:

Medizinprodukte Klasse I,

Regel 1 und 12 nach Anhang IX der MDD

Produktbezeichnung/Modell

Medizinisch genutztes Bett allgemein

Gewähltes Konformitätsbewertungsverfahren:

Anhang VII der MDD

Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Produkte die Vorkehrungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte erfüllen. Die gesamte zugehörige Dokumentation wird in den Räumlichkeiten des Herstellers aufbewahrt.

Angewandte Standards:

DIN EN 60601-1:2007

DIN EN 60601-1-2:2007

DIN EN 60601-2-52:2010

DIN EN ISO 14971:2013

Harmonisierte Standards, für die der Beweis der Übereinstimmung geliefert werden kann:

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1:

Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-2:

Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen und Prüfungen

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-52:

Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Betten

Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte

Verl, 26. Februar 2014



Klaus Bock



Dr. Stefan Kettelhoit

Regelmäßige Funktionsprüfung

gemäß MPBetriebV, BGV A3 und DIN EN 62353 (elektrische Messung)

.bock 

Prüfgegenstand: ☐ Bett

☐ Einlegerahmen

☐ Steuergerät/Hauptantrieb

Modellbezeichnung:

Serien- /Inventarnummer:

Standort:

Verantwortlicher:

Datum, Prüfer:

Visueller, mechanischer und elektrischer Prüfungsschritt

1. Ist der allgemeine Zustand des Bettes in Ordnung?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
2. Aufschriften/Typenschilder am Bett und an den Motoren vorhanden und lesbar?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
3. Gebrauchsanweisung / Dokumentation vorhanden und gut aufbewahrt?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
4. Mechanische Konstruktion mängelfrei und ohne gerissene Schweißnähte?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
5. Fester Sitz und Vollständigkeit aller Kunststoff-Verschlusskappen sowie der mechanischen Verbindungselemente (Schrauben, etc.)?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
6. Federholz, Trägerplatten und Dübel für ripolux/riproplan ohne Risse und Abbruchstellen?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
7. Fester Sitz in richtiger Position der Federholz / Trägerplatten?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
8. Fester Sitz und gerade Ausrichtung der einzelnen Federelemente?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
9. Druckbelastung der einzelnen Federelemente?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
10. Fester Sitz und keine Beschädigung der Kopf- und Fußendstücke?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
11. Verstellbereich der Liegefläche und Hubbereich ohne Hindernisse am Aufstellungsort?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
12. Sicherer Rastermechanismus der Unterschenkellehne in jeder Stufe auch unter Belastung?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
13. Seitengitterholme ohne Risse, Bruch oder Beschädigung?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
14. ausreichende Befestigung bzw. fester Sitz der Seitengitterholme / -teile?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
15. Belastungsprobe der Seitengitter ohne Verformung?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
16. Leichter Lauf der Seitengitter in den Schienen und sicheres Einrasten?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
17. Einwandfreie Funktion der Seitengitter?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
18. Abstand zwischen den Seitengitterholmen max. 12 cm?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	

19. Höhe der Seitengitter über der Matratze mind. 22 cm?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
20. Bett-Zubehör (Aufrichter, Triangelgriffe, Gurte, Sperrbox etc.) ohne Verschleißerscheinungen und sichere Fixierung?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
21. Sichere Bremswirkung, Arretierung und freier Lauf der Rollen?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
22. Netzkabel, Verbindungsleitungen und Stecker ohne Abschürfungen, Druck- und Knickstellen, poröse Stellen und frei liegende Drähte?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
23. Zugentlastung fest verschraubt und einwandfrei wirksam?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
24. Interne Steckverbindungen ganz eingesteckt und mit Zugentlastung verbunden?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
25. Netzanschlussleitung/-stecker ohne Beschädigung?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
26. korrekte und sichere Kabeldurchführung und Kabelverlegung?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
27. Gehäuse der Motoren und Handschaltung dicht und ohne Beschädigung?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
28. Motor-Tropfschutz für Modelle vor 2001 vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
29. Motor-Hubstangen einwandfrei ohne Beschädigungen?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
30. Funktionsprüfung des Handschalters: einwandfreie Bedienung der Tasten?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
31. Funktionsprüfung der Handschalter-Sperreinrichtung: alles in Ordnung?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
32. Funktionsprüfung der Akku / Block-Batterie: einwandfreie Funktion?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
33. Schutzleiterwiderstand: entfällt, da kein Schutzleiter vorhanden ist. (Schutzklasse II)	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	
34. Isolationswiderstand (für Altgeräte) (Prüfspannung initiieren und Widerstand messen, Meßwert muss > 7 MΩ sein):	
Mängelbeschreibung:	
35. Ersatzableitstrom, Höchstwert (Gerät über 200 V, Schutzklasse II, Typ B, Grenzwert = 0,1 mA):	☐ OK ☐ Nicht OK
Mängelbeschreibung:	
36. Überschreitet das Patienten-, Matratzen- und Zubehörgewicht die geforderte sichere Arbeitslast (siehe Technische Daten)?	☐ Ja ☐ Nein
Mängelbeschreibung:	

Gesamtbewertung des Bettes: Bett in Ordnung?	☐ Ja ☐ Nein
--	---

Bemerkungen:	

Ort und Datum:	
Unterschrift Prüfer:	
Nächste Prüfung	



Hermann Bock GmbH
Nickelstr. 12
D-33415 Verl

Telefon: +49 (0) 52 46 92 05-0
Telefax: +49 (0) 52 46 92 05-25
Internet: www.bock.net
E-Mail: info@bock.net

® eingetragenes Warenzeichen
890.02059 | Stand Oktober 2014
Technische Änderungen vorbehalten.

Unsere VERTRIEBSPARTNER

Unsere Geschäftspartner setzen, wie wir selbst, auf Qualität, Innovation und überdurchschnittliche Standards, die international anerkannt sind. Wir können uns auf unsere Partner ebenso gut verlassen, wie Sie sich auf uns.

Beachten Sie bitte, dass nur durch unser autorisiertes Personal und unsere Vertriebspartner, Schulungen, Ersatzteilversorgung, Reparaturen, Sicherheitstechnische Kontrollen (STK) und sonstiger Service gewährleistet werden kann. Ansonsten gehen sämtliche Garantieansprüche verloren.

Hier ein kleiner Auszug:

Australien	alphacare www.alphacare.com.au
Belgien	AXAMED nv-sa www.axamed.be
Dänemark	Medema Danmark AS www.medema.dk
Dubai	Bridgeway Medical S. www.bridgewayhealthcare.com
England	Carebase www.carebase.net
Estland	ITAK Ltd. www.itak.ee
Finnland	RESPECTA OY www.respecta.fi
Frankreich	DLM www.dlmcreations.net
Griechenland	Wheel Rehabilitation Products www.wheel.gr
Israel	Israel Quality of Life Center www.iqlc.com
Italien	Enrico Spadoni www.bock.net
Kroatien	BEZ LIMITA d.o.o. www.bezlimita.hr
Libanon	ALBERT MASSAAD s.a.r.l. www.albertmassaad.com
Luxemburg	Stoll www.matelas.lu
Neuseeland	Cubro Rehab Ltd. www.cubrorehab.co.nz
Niederlande	Eureva B.V. www.eureva.nl
Norwegen	Medema Norge AS www.medema.no
Oberösterreich	Reha Service GesmbH www.rehaservice.at
Sonstige Ö-Bundesländer	Maierhofer GmbH & CoKG www.maierhofer.co.at
Polen	Timago International Group Sp. z o.o. www.timago.pl
Portugal	MACHADOS www.machadosmadeira.com
Rumänien	Donis srl www.donis.ro
Russland	Lazerlink
Schweiz	Sodimed www.sodimed.ch
Serbien	Proxi-Med d.o.o www.proxi-med.co.rs
Slowenien	Medimaj d.o.o. www.medimaj.com
Slowakei	Servis Invo www.servisinvo.sk
Bock Spanien	Ferran Asensio Jou www.bock.net/es/
Tschechien	Ortoservis www.ortoservis.cz
Ukraine	ADS Ukraine